

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen um einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich an diese Hinweise. Verwerfen Sie diese Bedienungshinweise in der Nähe des Gerätes.

Installation

⚠️ GEFAHR

- ⊘ NICHT in der Nähe von offenem Feuer anbringen
- ⊘ NICHT in der Nähe von Geräten anbringen, die Funken versprühen können, da dies eine erhöhte Brandgefahr bedeutet.

⚠️ WARNUNG

- ⚠️ Nur innen anbringen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ⊘ NICHT mit beidseitigem Klebeband an gestrichenen Wänden anbringen

⚠️ VORSICHT

- ⚠️ Das Gerät in einem Bereich anbringen, der weder nass noch feucht ist.
- ⚠️ Installation des Gerätes nur an stabilen Wänden oder ebenen, festen Flächen.

Gebrauch

⚠️ WARNUNG

- ⊘ KEIN WASSER. Machen Sie das Gerät nicht nass, da dies die elektrischen Leitungen beeinflussen kann.
- ⊘ Trinken Sie das Produkt NICHT. Es könnte Ihre Gesundheit schädigen.

- ⚠️ Belüftung erforderlich. Sorgen Sie für eine gute Belüftung in den Räumen in denen das Gerät hängt, da die Dämpfe des Alkohols Einfluß auf Ihre Gesundheit haben können.
- ⊘ Benutzen Sie das Gerät nur zu dem angegebenen Zweck. Benutzen Sie das Gerät nicht zum waschen von Gesicht oder Haaren. Vermeiden Sie Kontakt zwischen dem Produkt und Ihren Augen.

⚠️ VORSICHT

- ⊘ Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es nicht unter Druck.
- ⊘ Halten Sie Antiseptika fern von offenen Flammen, da die Brandgefahr sehr groß ist.
- ⊘ Halten Sie, durch Alkohol, nasse Hände nicht in die Nähe von offenem Feuer!
- ⚠️ Benutzen Sie nur Produkte, die Ihnen von SARAYA empfohlen wurden. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt auf mit Ihrem SARAYA Vertreter oder mit SARAYA Europe.
- ⊘ Inhalieren Sie keine alkoholhaltigen Produkte, da diese zu Irritationen in der Nase oder im Rachen führen können.
- ⊘ Stellen Sie nichts auf das Gerät, es könnte herunterfallen und das Gerät beschädigen oder jemanden verletzen.
- ⚠️ Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise um einen richtigen Gebrauch zu gewährleisten.
- ⚠️ Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise bei der Installation, dem Öffnen und Schließen der Abdeckung und dem Wechseln der Batterien.
- ⚠️ Die beste Leistung erzielen Sie mit 4 neuen Alkalibatterien.
- ⊘ Verschütten Sie das Produkt nicht. Falls doch etwas verschüttet wurde, wischen Sie es bitte sofort weg.
- ⚠️ Vorsichtsmaßnahmen bei Aufbewahrung. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, wischen Sie das Gehäuse ab und entfernen Sie die Batterien.
- ⊘ Stellen Sie die Batteriehalterung mit Batterien nicht auf leitende Materialien.

Reparatur

⚠️ VORSICHT

- ⊘ Bei Reparaturen bitte immer einen Fachmann hinzuziehen!!!

Bitte beachten Sie die folgenden Beschreibungen

⚠️ GEFAHR	Eine ernste Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen kann.
⚠️ WARNUNG	Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen kann.
⚠️ VORSICHT	Eine Gefahr die eventuell zu Komplikationen führt und zu Schäden führen kann.

Bildbeschreibung:

⊘ NIE versuchen
⚠️ Diese Hinweise IMMER beachten
⊘ NIE versuchen selber zu reparieren.

SARAYA Sensor Desinfektionsmittel Spender


Bedienungshinweise

UD-1000

Vielen Dank für den Erwerb des SARAYA Sensor Desinfektionsmittel Spenders. Bitte lesen Sie diese Bedienungshinweise sorgfältig vor de Benutzung des Gerätes.

BASISTEILE

1. Basisteile / Größe

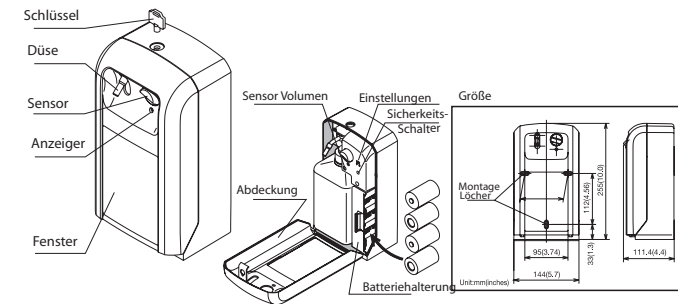

2. Zubehör

Bitte überprüfen Sie ob sich folgendes Zubehör in der Verpackung befindet. Sollte etwas fehlen benachrichtigen Sie bitte Ihren Saraya Vertreter oder Saraya Europe (Adresse siehe am Ende der Bedienungshinweise)



Installation

1. Geeignete Stellen zum Anbringen des Gerätes


Zur optimalen Funktion, das Gerät NICHT an folgenden Stellen anbringen:

- in Räumen mit einer sehr hohen Feuchtigkeit
- an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung oder Scheinwerferlicht

2. Installation

(1) Montierung auf einer Oberfläche


Achten Sie auf eine angenehme Höhe für die Benutzung. Um das Gerät mit dem Schlüssel zu öffnen und zu schließen benötigen Sie mindestens 15 cm oberhalb des Gerätes

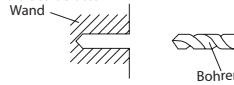

(2) Montierung an der Wand

Um das Gerät mit dem Schlüssel zu öffnen und zu schließen benötigen Sie mindestens 15 cm oberhalb des Gerätes


- Bohren Sie, an den passenden Stellen, 3 Löcher in die Wand.
- Schlagen Sie die Dübel in die Wand und befestigen Sie das Gehäuse gut mit den Schrauben.

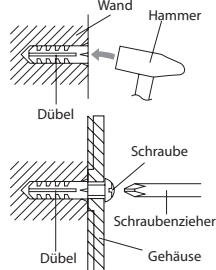

(3) Tablett

Das Tablett können Sie anbringen indem Sie den Hacken, der sich am Tablett befindet, verankern in dem Loch an der Unterseite des Gehäuses.

Um das Tablett wieder zu entfernen, ziehen Sie es bitte nach vorne während Sie das Gehäuse festhalten

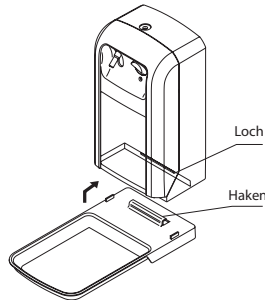

BENUTZUNG

1. Vorbereitungen

(1) Öffnen und schließen der Abdeckung

ÖFFNEN:

- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss oben am Gerät
- Drehen Sie den Schlüssel auf die Position "open" und entfernen Sie das Schloss mit dem Schlüssel.
- Halten Sie die Abdeckung an der Oberseite und ziehen Sie sie nach vorne.

SCHLIESSEN:

- Schließen Sie die Abdeckung sorgfältig
- Stecken Sie Schlüssel und Schloss in das Loch und drehen Sie den Schlüssel mindestens um 90°
- Entfernen Sie den Schlüssel

(2) Einlegen der Batterien

HINWEIS Wenn die Batterien fast leer sind, blinkt die rote Lampe. Bitte legen Sie 4 neue Batterien ein.

HINWEIS Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise: Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu Verletzungen durch Hitze, Explosion, Auslaufen oder Entzündung der Batterien führen.

- Legen Sie die Batterien richtig ein.
- Laden Sie die Batterien nicht auf
- Wenn Batterien auslaufen, Gehäuse reinigen und neue Batterien einlegen.
- Batterien entfernen wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Mischen Sie nie neue und alte Batterien.

(3) Einstellungen

Wählen Sie die passende Einstellung über den Schalter (siehe Abbildung)
Einstellung 1Ein Sprühstoß pro Handerkennung
Einstellung 2Zwei Sprühstöße pro Handerkennung

(4) Einstellen der Flasche



HINWEIS Achten Sie darauf, dass die Düse der Sprühflasche nach vorne zeigt.

(5) Anpassung des Sensors

Die Sensorerfassung kann angepaßt werden durch das Sensorvolumen: Zur Verlängerung, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, zur Verkürzung im Uhrzeigersinn drehen.

2. Benutzung

Halten Sie die Hände unter die Düse. Ein Infrarotsensor erkennt Ihre Hände und sprüht automatisch. Falls Sie mehr vom Produkt benötigen, entfernen Sie Ihre Hände, warten Sie 2 Sekunden und halten Sie die Hände erneut unter die Düse.

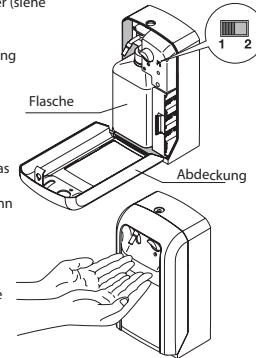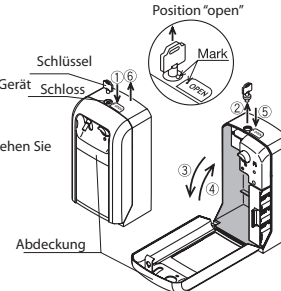

REINIGUNG UND UNTERHALT

Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen Tuch, eventuell mit lauwarmem Seifenwasser

HINWEIS Verwenden Sie keine harten Bürsten, scharfe Reinigungsmittel oder andere Hilfsmittel, die das Gerät beschädigen können.

REPARATURHINWEISE

Sollten während des Gebrauches Probleme auftreten, stellen Sie die Benutzung des Gerätes bitte ein. Die folgenden Hinweise könnten Ihnen bei der schnellen Lösung des Problems helfen:

Problemlösungen

Problem	Ort des Problems	Lösung
Rote Lampe blinkt	Batterien	Legen Sie 4 neue Batterien ein
Produkt wird nicht versprüht (Düse bewegt sich)	Flasche	Flasche ist leer, Bitte setzen Sie eine neue Flasche ein
Produkt wird nicht versprüht (Düse bewegt sich nicht)	Batterien	Überprüfen Sie ob die Batterien noch in Ordnung sind
Produkt wird nicht versprüht (Düse bewegt sich nicht)	Sensorvolumen	Passen Sie den Sensor an

Untersuchen Sie die oben genannten Möglichkeiten. Sollte das Problem nicht gelöst sein, benachrichtigen Sie Ihren SARAYA Vertreter oder SARAYA Europe.

TECHNISCHE DATEN

Name	Sensor Spender	
Model	UD-1000	
Größe	Höhe 225mm x Breite 144mm x Tiefe 106 mm	
Gewicht	740 Gramm (exclusive Chemischer Produkte, Zubehör usw.)	
Material	Abdeckung	ABS
	Gehäuse	ABS
	Sichtfenster	PP
	Tablett	PP
Stromzufuhr	4 Alkalibatterien "D"	
Installation	Stehend oder angebracht an der Wand	

Diese Angaben sind ohne Gewähr und können sich ohne Benachrichtigung ändern

SARAYA Europe
Sint-Annadreef 68 B
1020 Brüssel
Belgien

Tel.: 00 32 2 790 27 44
Fax: 00 32 2 476 25 87