



DÜRR SYSTEM-HYGIENE

Sichere Hygiene am laufenden Band

DÜRR HYGOPAC UND HYGOFOL

Perfekt einfach – einfach perfekt!

DURCHLAUFSIEGELGERÄT DÜRR HYGOPAC

Sterilisation nach Norm

Die Sterilisation gehört zu den wichtigsten Maßnahmen einer konsequent durchgeführten Praxishygiene. Sowohl die Art der Sterilgutverpackung als auch deren Versiegelung sind für die Qualität des Sterilisationsvorgangs von entscheidender Bedeutung. Klare Anforderungen gilt es entsprechend den Normen DIN 58953-7 und EN 868 zu erfüllen.



Mit hoher Bedienungssicherheit ist hygienisch alles unter Kontrolle.



Hygopac Durchlaufsigelgerät – Sicherheit am laufenden Band für zahnärztliches und zahntechnisches

Versiegelung mit dem Dürr Hygopac

Die Versiegelung von Sterilgutverpackungen ist entsprechend Normen umfassend definiert. So wird unter anderem gefordert, dass

- die Siegelnähte durchgehend und ohne Fehlstellen sein müssen, damit keine Mikroorganismen eindringen können
- die Breite der Siegelnähte mindestens 6 mm betragen muss
- die Siegelnähte ohne Komplikationen peelbar, also auseinander zu schälen sein müssen

Dass der Dürr Hygopac alle geforderten Punkte erfüllt, ist selbstverständlich. Dass mit ihm manche Forderungen sogar noch übertroffen werden, wie beispielsweise den Erhalt einer Siegelnahtbreite nicht nur von 6 mm, sondern von 9 mm Breite, sei hier nur erwähnt.

Viel eindrucksvoller ist es, wie perfekt einfach mit ihm alles gelingt ...



Stufenlos einstellbare Siegeltemperatur – zu Ihrer Sicherheit auf Hygofol-Sterilisierverpackung eingestellt.



Instrumentarium.

Klare Vorteile des Dürr Hygopac

Der Dürr Hygopac ist ein Durchlaufsiegelgerät – mit allen Vorteilen gegenüber einem Balkenschweißgerät. Vergleichen Sie selbst!

- Automatischer Anpressdruck gewährleistet stets gleichbleibende Siegelnaht-Qualität
- Der äußerst enge Einlaufspalt verhindert Beschädigung von Instrument und Gerät
- Das Fließbandprinzip ermöglicht schnelles und permanentes Arbeiten
- Der standardisierte Arbeitsablauf reduziert individuelle Fehler erheblich
- Das Gerät ist platzsparend und durch seine kompakte Bauweise äußerst langlebig

Nachteile eines Balkenschweißgeräts

- Manueller Anpressdruck erfordert einen individuellen und hohen Kraftaufwand
- Instrumente können in den Heizleistenbereich gelangen, wodurch sowohl die Heizleisten als auch die Instrumente beschädigt werden können
- Erhöhter Zeitaufwand: Schweißdauer je Sterilgutverpackung 2 – 5 Sekunden
- Größerer Platzbedarf der Geräte

„Bei einem hohen Anfall von zu versiegelnden Papierbeuteln und Klarsichtsterilisierverpackungen sind Durchlaufsiegelgeräte zu bevorzugen.“
(aus DIN 58953-7)

Leistung kompakt – Dürr Hygopac

- Anschluss 220 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme 550 W
- Versiegelungstemperatur stufenlos einstellbar (bis 240 °C). Werkseitig auf Hygofol-Sterilisierverpackung eingestellt
- Anpressdruck einstellbar
- Durchlaufgeschwindigkeit 5,3 m/min
- Gewicht 7,2 kg

Sterilgut auf Nummer sicher

STERILISIERVERPACKUNG DÜRR HYGOFOL

Eine Lösung – drei Größen

Mit den Hygofol Klarsichtsterilisierverpackungen können zahnärztliche Instrumente schnell und sicher verpackt werden. Drei verschiedene Größen ermöglichen die optimale Durchführung:

- 7,5 x 30 cm
- 10 x 30 cm
- 15 x 30 cm




Und das mit erheblicher Zeitersparnis gegenüber der Verwendung von Schlauchware, denn

- es ist kein zeitaufwändiges Abschneiden notwendig – man hat stets die richtige Verpackung in Breite und Länge für das entsprechende Instrument
- es ist nur eine Siegelnaht erforderlich; dadurch ergibt sich eine Zeitersparnis von 50% gegenüber der Schlauchware

Bestellnummern

Dürr Hygopac	6020-000-00
Dürr Hygofol 500er Packungen	
KBOS 7,5 x 30 cm	6020-061-00
KBOS 10 x 30 cm	6020-062-00
KBOS 15 x 30 cm	6020-063-00

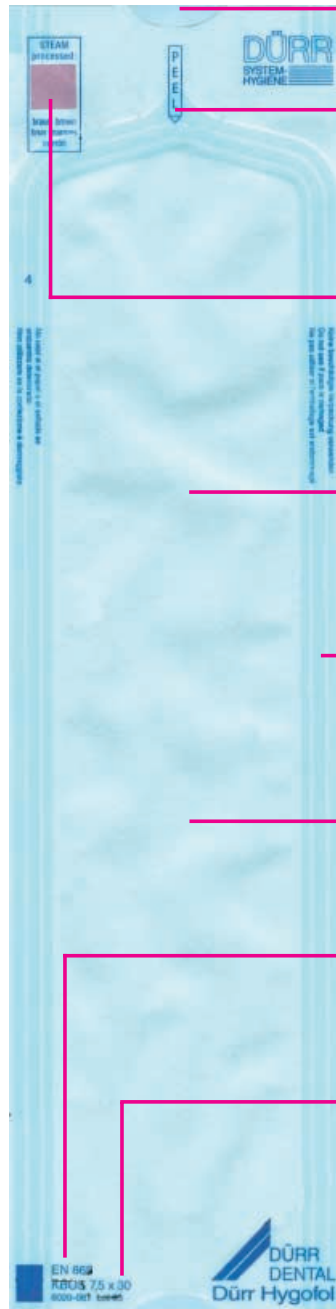

Daumenausschnitt für leichtes und sicheres Handling

Optimaler Peelverschluss: leichtes Öffnen ohne Kontaminationsgefahr für das sterilisierte Instrument

Indikator für Dampfsterilisation

Hochwertiges Sterilisationspapier (80 g/qm) für hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit

9 mm breite Siegelnähte für höchste Sicherheit

Zwei-Schichten-Laminatfolie gewährleistet sicheres Versiegeln

Dürr Hygofol Sterilisierverpackungen sind normgerecht und entsprechen allen geforderten Kriterien nach EN 868

Maßangabe für schnelle Auswahl der Sterilisierverpackung für das entsprechende Instrument

Füllöffnung mit Daumenausschnitt für leichtes und sicheres Handling

Dürr Dental GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen

www.duerr.de
info@duerr.de

