



Das interessiert den Praktiker:

- OdoBleach + elexxion-Diodenlaser = höchste Effektivität
- Menge individuell dosierbar
- Konsistenz individuell einstellbar
- Kontrollierte Wirkung (2-4 Anwendungen in einer Sitzung)
- Je nach Farbtyp/ Verfärbung Aufhellung um bis zu 9 Stufen
- Effiziente Anwendung in 30-40 Minuten
- Idealer pH-Wert: 6,5

elexxion AG

OdoBleach® ist ein eingetragenes Markenzeichen der elexxion AG

Exklusiver Vertriebspartner für
Deutschland und Österreich



elexxion AG
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell

www.elexxion.com

elexxion AG

elexxion ODOBleach®



Profi-Behandlungsset Laser-Powerbleaching

Höchste Effektivität für alle
elexxion-Diodenlaser

Exklusiver Vertriebspartner für
Deutschland und Österreich



elexxion AG



Für Profis: **ODOBleach**[®]

Wirtschaftlicher und sicherer!


Herkömmliche H₂O₂-Bleaching-Gels benötigen lange Einwirkzeiten, erfordern oft mehrere Sitzungen und erzeugen einen sauren pH-Wert mit dem Risiko von Sensibilitätsstörungen.

OdoBleach[®] wirkt anders! Bei OdoBleach[®] wirken Titandioxid und Wasserstoffperoxid in Kombination – verstärkt durch die Intensität des elexxion-Diodenlasers. OdoBleach ist speziell abgestimmt auf die Wellenlänge der elexxion-Geräte.

Das Ergebnis: Kurze Einwirkzeiten, keine Schädigung der Zahnoberfläche, keine hypersensiblen Spätreaktionen, hohe Wirtschaftlichkeit.

Alles drin:

Jede OdoBleach[®]-Packung enthält das komplette Set, das Sie benötigen, um in einer Sitzung einem Patienten wieder zu strahlend weißen Zähnen zu verhelfen. Damit lässt sich Ihr Material- und Ihr Zeiteinsatz exakt planen und berechnen.

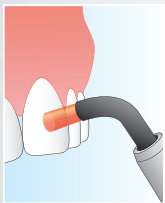

Für den erfolgreichen Einsatz von OdoBleach[®] eignen sich Diodenlaser mit einer Wellenlänge von 810 nm.

Die OdoBleach[®]-Desensibilisierungsgel-Spritze

Zur abschließenden Politur und zur Neutralisierung.

OdoBleach[®]-Bleaching-Powder

Für schnellen Erfolg in einer Sitzung.

H₂O₂ 30% Basislösung

Zum Anmischen des Pulvers.



Die OdoBleach[®]-Liquid-Dam-Spritze

Für den perfekten Zahnfleisch-Schutz.

Spitze zur Liquid-Dam-Spritze

Damit geht's los.

Die Spitze zur Desensibilisierungsgel-Spritze

Nur aufstecken, fertig!

elexxion Powerbleaching

Wenn es um Bleaching geht, stehen zwei Dinge im Vordergrund: Glückliche Patienten und eine hohe, stetige Wirtschaftlichkeit der Behandlungsmethode. Wichtig: Laser-Powerbleaching mit OdoBleach und einem elexxion-Diodenlaser kann nach Anleitung durch den Zahnarzt auch vom Assistenzteam durchgeführt werden.

Mit den hochwertigen Diodenlasern von elexxion steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das hinsichtlich der Funktionen und der Kosten/Nutzen-Relation in jede Praxis passt: Vom brandneuen, mobilen claros pico[®] mit modernsten Lithium-Ionen-Akkus bis zum delos[®], einer Stand-alone Er:YAG/Diodenlaser-Kombination.

Mehr über das komplette Programm von elexxion und über OdoBleach[®] erfahren Sie von den Fachberatern unseres Vertriebspartners pluradent (www.pluradent.de).



Von links nach rechts: claros pico, claros nano, claros und delos

elexxion AG