


Überragende Ergonomie in ihrer schönsten Form.

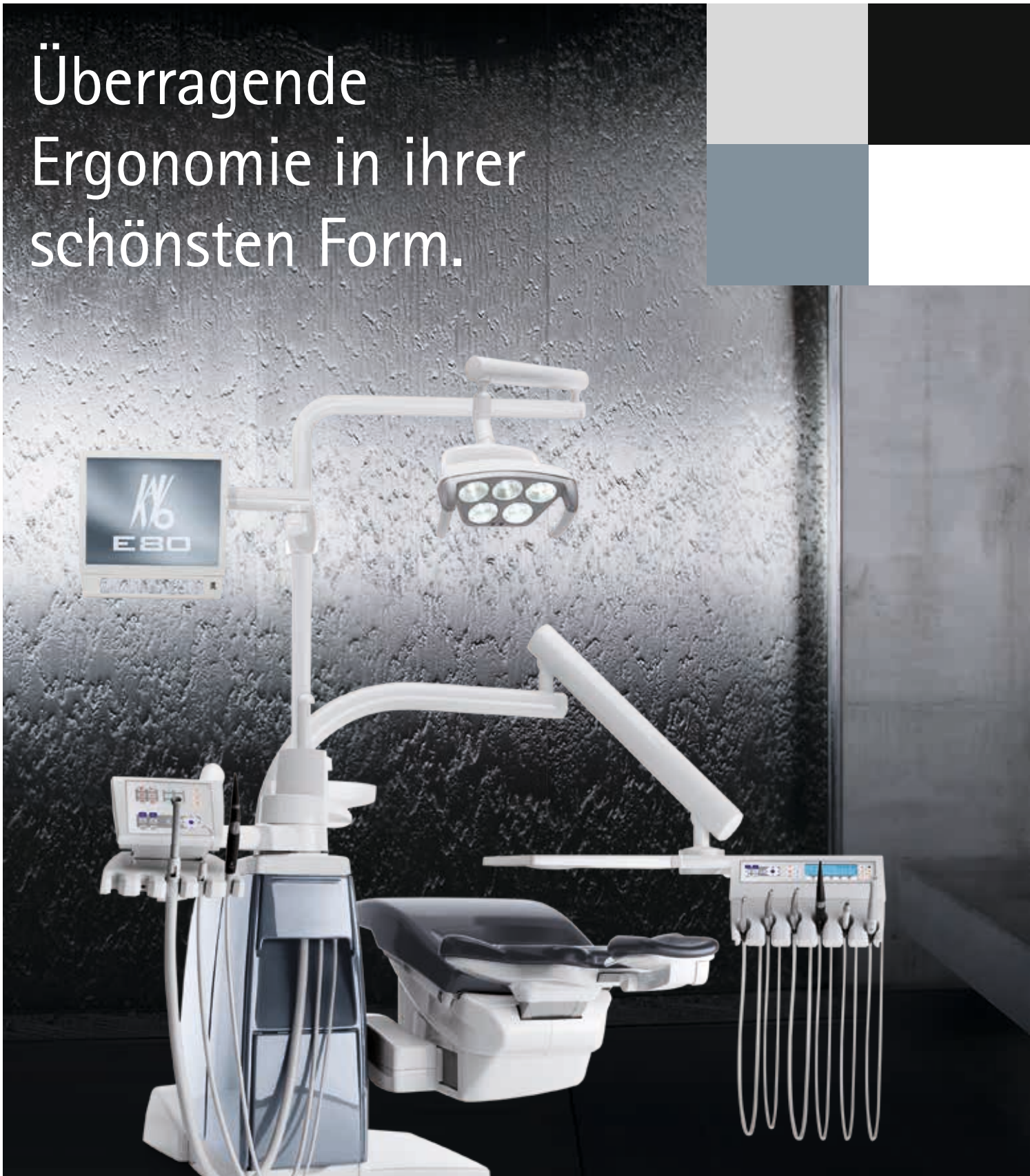

KaVo. Dental Excellence.

Die hohe Kunst intelligenter zu arbeiten – die KaVo ESTETICA E80.

Am Anfang stand eine klare Aufgabe: Wie kann KaVo Zahnärzten eine Behandlungseinheit zur Verfügung stellen, die optimales Arbeiten zur täglichen Selbstverständlichkeit werden lässt, bei jedem einzelnen Patienten? Die sinnvollste Antwort: Mit Komponenten, die intelligente Zukunftstechnologien enthalten und die durch ihre bewährte Qualität und Präzision absolut zuverlässiges Behandeln erlauben.

Nehmen Sie sich die Freiheit – für entspanntes Arbeiten in jeder Position.

Innovation für mehr Bewegungsfreiheit.

Das innovative Schwebestuhlkonzept schenkt Ihnen die entscheidende Bewegungsfreiheit. Denn der Platz unter dem Patientenstuhl ist bei der KaVo ESTETICA E80 vollständig geräumt für Sie und Ihre Assistenz. Sie gewinnen reichlich Raum für unterschiedlichste Beinpositionen und sitzen entspannter. Ihre Arbeitsabläufe gestalten sich ermüdungsfreier und werden effizienter.

Sicher und komfortabel nach Trendelenburg.

Abhängig von der Rückenlehnenneigung hebt oder neigt sich die Fußablage des Patientenstuhls. Durch die erhöhte Lagerung wird das Kreislaufsystem des Patienten unterstützt. Die kombinierte Bewegung verhindert zusätzlich eine Stauchung und Streckung des Patienten während der Rückenlehnenverstellung. Die automatisierte Trendelenburg-Bewegung gewährleistet Ihnen und Ihren Patienten ein Plus an Sicherheit und Komfort.

Ihre Gesundheit steht im Mittelpunkt.

Die KaVo ESTETICA E80 passt sich perfekt Ihrer Körpergröße, Ihren individuellen Arbeitspositionen und Gewohnheiten an. Ideale Bedingungen für eine ergonomisch gesunde und belastungsfreie Körperhaltung. Sie behandeln wesentlich einfacher – reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe sind jederzeit gewährleistet. Mit der variablen Stuhlhöhe von 350 bis 900 mm sind Sie stets flexibel und können auch im Stehen behandeln.



*Die KaVo ESTETICA E80 in der Cart-Version –
äußerst mobil, höhenverstellbar und immer dort,
wo Sie sie benötigen.*



Jederzeit bestens positioniert – mehr Komfort für alle Beteiligten.


Bestlage für Ihre Patienten.

Mit der Sitzbankanhebung werden Ihre Patienten einen unerreichbaren Komfort genießen. Die motorische Anpassung der Sitzfläche an die Patientenbedürfnisse sorgt für eine entspannte Patientenlagerung. Der Behandlungsstuhl Ihrer KaVo ESTETICA E80 ist so flexibel einstellbar, dass sich auch Patienten mit Hohlkreuz oder Rundrücken wohlfühlen. Selbst bei der Behandlung von Kindern erreichen Sie eine ebene Liegefläche bei der Oberkieferbehandlung. Zusätzlich stehen Ihnen für Ihre Patienten Softpolster zur Verfügung.



Den Komfort der motorischen Sitzbankanhebung genießen Sie und Ihre Patienten nur bei KaVo.

Mit dem automatischen Ausgleich durch die Horizontalverschiebung befindet sich der Kopf Ihres Patienten immer exakt an der gleichen Stelle – egal, ob zur Oberkiefer- oder Unterkieferbehandlung.

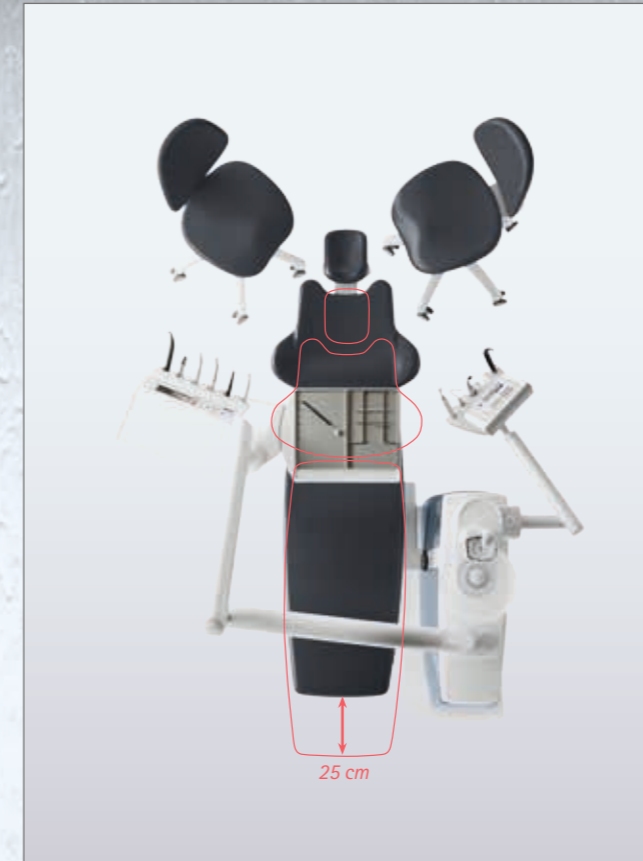

Nutzen Sie den durch die horizontale Verschiebbarkeit gewonnenen Raum frei nach Bedarf, z. B. für eine weitere Assistenz oder die Platzierung autarker Zusatzgeräte.

Mehr Flexibilität und Präzision dank Horizontalverschiebung.

Ihr Arbeitsfeld, der Mund des Patienten, wird durch die Einstellmöglichkeiten der KaVo ESTETICA E80 so positioniert, dass er sich horizontal immer an derselben Behandlungsstelle befindet – auch wenn Sie den Patientenstuhl beim Wechsel zwischen Ober- und Unterkieferbehandlung bewegen. Sie müssen Ihre Position nicht verändern und weder Leuchte noch Arztelement nachjustieren.

Slow Motion für mehr Komfort.

Mit der Slow Motion Funktion Ihrer KaVo ESTETICA E80 lässt sich der Patientenstuhl sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung mit verringerter Geschwindigkeit, wie in Zeitlupe, bewegen. Sie werden dies besonders beim Einsatz des Mikroskops und bei der Behandlung älterer Patienten zu schätzen wissen.

Patientenstuhl und Gerätekörper – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Schwebestuhl für optimale Beinfreiheit
- Horizontalverschiebung bis zu 25 cm – für eine gleichbleibende Position des Patientenkopfes
- Stuhlpositionen von 350 bis 900 mm für bequeme Sitzhaltung sowie stehendes Arbeiten
- Geräuschoptimierte Stuhltriebe mit Softstart
- Sitzbankanhebung motorisch bedienbar
- Trendelenburg-Bewegung, Softpolster u. v. m.

Alles jederzeit perfekt im Griff – das intuitive Arztelement.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen – individuell und intuitiv einfach.

Je nachdem, wie Sie arbeiten, stellen Sie Ihre Instrumente einfach so ein, wie Sie sie benötigen. Ihr Bedienelement hält alle Funktionen genau dort zum Abruf bereit, wo Sie diese bereits intuitiv erwarten. Greifen Sie direkt und bequem auf alle wichtigen Funktionen zu und sparen Sie dadurch wertvolle Zeit. Motordrehzahl und Intensitätsspeicherung lassen sich indikationsbezogen festlegen. Bei der Behandlung sind Sie damit flexibel und können auf die jeweils notwendige Drehzahl zugreifen. Der individuell schwenk- und einstellbare Servicetisch sorgt für optimale Erreichbarkeit in jeder Behandlungssituation.

Integrierte Endo- und Chirurgieantriebe für präzise Höchstleistungen.

Da Ihre KaVo ESTETICA E80 auf optimale ergonomische Arbeitsabläufe ausgerichtet ist, sind Endo- und Chirurgieantriebe in Ihrem Behandlungssystem integriert.

Der Vorteil für Sie: Ihr Workflow wird dadurch reibungsloser und effizienter, Ihre Wege sind messbar verkürzt, und Sie sparen sich die Anschaffung zusätzlicher Instrumente für endodontische und implantologische Arbeiten.

Die sinnvollste Kombination bestimmen Sie selbst.

Das Arztelement Ihrer KaVo ESTETICA E80 bildet eine funktionelle Brücke zwischen Ihnen und Ihrer Assistenz. Der Instrumententräger für sechs Instrumente mit integriertem Servicetisch lässt sich leicht und präzise in alle Richtungen bewegen. Damit haben Sie und Ihre Assistenz direkten Zugriff auf alle benötigten Instrumente. Ihr Arztelement lässt sich je nach Bedarf individuell konfigurieren.

Ganz gleich, ob Sie die Tisch- oder Cartversion bevorzugen: An Ihrem Arztelement stehen Ihnen standardmäßig sechs Plätze für Ihre Instrumente und die intraorale Kamera zur Verfügung.

Bleiben Sie offen für die Zukunft – dank integrierter USB-Schnittstellen.

Schließen Sie über die USB-Schnittstellen Ihrer KaVo ESTETICA E80 ganz einfach weitere ausgewählte Geräte an. Das geht besonders einfach, weil bei USB in der Regel keine zusätzlichen Einstellungen notwendig sind. Ihr Behandlungssystem erkennt von selbst, was Sie angeschlossen haben.

Ihr Bedienfeld verfügt über praktische Direktwahltasten, und über das moderne Display lassen sich auch die Multimediafunktionen Ihrer KaVo ESTETICA E80 steuern – ebenso einfach wie per Bildschirm oder Fußanlasser. Die pneumatische Bremse ermöglicht ein präzises Bewegen des Arztelements und sorgt für eine stabile Positionierung.

Endodontie für höchste Ansprüche.

Mit Ihrer KaVo ESTETICA E80 erhalten Sie den neuen, kollektorlosen und sterilisierbaren INTRA LUX KL 703 LED Mikromotor. Neben seinem breiten Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹ verfügt er über eine spezielle Endodontiefunktion mit einstellbarer Drehmomentbegrenzung. Je nach Übersetzung Ihres Instruments können Sie damit Drehmomentwerte zwischen 0,15 und 8 Ncm frei über die Wahltasten Ihres Arztelements programmieren. Um Ihren Workflow ideal zu gestalten, können Sie darüber hinaus die Parameter für verschiedene endodontische Arbeitsschritte abspeichern.



Mit Ihrer KaVo ESTETICA E80 und den integrierten Endo- und Chirurgieantrieben werden Stand-alone-Endo- und Chirurgie-Geräte für Sie überflüssig.

Bestens auf Chirurgie eingestellt.

Wenn Sie wünschen, erhalten Sie als siebtes Instrument den KaVo SL 550 Chirurgiemotor. Exklusiv bei KaVo: Damit stehen Ihnen mit den KaVo-Lichtinstrumenten direkt an Ihrer KaVo ESTETICA E80 uneingeschränkt die Funktionen eines modernen Chirurgiegeräts zur Verfügung. Ihr Behandlungssystem erkennt automatisch, welches der KaVo-Chirurgie-Instrumente Sie verwenden und stellt für Sie die richtige Untersetzung ein. Sie können die Programmschritte frei wählen und je nach Implantat erstellen. Die maximalen Drehmomente jedes Arbeitsschritts werden erfasst und liefern Ihnen wichtige Informationen zur Beurteilung der Primärstabilität der Implantate.

Arztelement und Ausstattung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Modular konfigurier- und erweiterbar
- Verbesserter Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹
- Intraoralkamera ERGOcam
- Adaptierbarer SL 550 Chirurgiemotor mit Drehmomentsteuerung
- Verstellbarer Servicetisch mit Ablage für zwei Normtrays
- Pneumatische Bremsen mit Sensor
- USB-Schnittstellen
- Viel Ablagefläche auf dem Element
- Intuitiv einfache und logische Bedienung über Direktwahltasten



Wir geben Ihnen eine Assistenz mehr – das flexible Assistenzelement.

Zukunftssichere Ausstattung für dauerhaft erstklassige Ergebnisse.

Die KaVo ESTETICA E80 fügt sich nahtlos in Ihr Team ein. Sie stellt sich auf die Behandlungspositionen Ihrer Assistenz ein und unterstützt sie mit allen benötigten Werkzeugen. Alles Wichtige ist ergonomisch perfekt angeordnet, die Bedienung funktioniert intuitiv einfach über Direktwahltasten für alle Stuhl-, Hygiene- und Instrumentenfunktionen.

Das Assistenzelement ist nicht nur frei konfigurierbar, sondern verfügt über völlig neue Möglichkeiten für Ihr Team. Integrieren Sie z. B. eine Polymerisationsleuchte oder eine zusätzliche Chirurgieabsaugung. Die Behandlungseinheit kann so schnell an die verschiedenen Behandlungen angepasst werden. Fördern Sie mit der individuellen Bestückung die Teamarbeit sowie die Effizienz aller Arbeitsabläufe. Ein absolut reibungsloser Behandlungsablauf ergibt sich damit praktisch von selbst.

Durch die vollständige Analogie zu Ihrem Arztelement sind bei Ihrem Assistenzelement die Stuhl-, Hygiene- und Instrumentenfunktionen schnell und einfach über Direktwahltasten abrufbar.

Assistenzelement – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Einfache, intuitive Bedienung über Direktwahltasten
- USB-Schnittstelle
- Zusätzliche Instrumente wie Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED
- Maximale Flexibilität durch Höhenverstellung und großen Schwenkbereich



Einfache Handhabung durch individuell einstellbaren Entnahmewinkel für Saugschläuche und Instrumente.

Intelligenz bis in die Fußspitzen – der komfortable Fußanlasser.

Für eine natürlich gesunde Fuß- und Beinstellung.

Der entscheidende Unterschied zu anderen Fußanlassern liegt in der Bewegungsrichtung Ihres Fußes zur präzisen Funktionssteuerung. Der Fußanlasser Ihrer KaVo ESTETICA E80 wird mit Rechts-links-Bewegungen Ihres Fußes bedient statt mit Auf-ab-Bewegungen. Die präzise Drehzahl steuern Sie daher nicht durch unterschiedliche Muskelanspannung, sondern mit sanften Bewegungen Ihres Fußes nach rechts und links. Dadurch bleibt Ihre Beinmuskulatur auch in langen Behandlungsphasen entspannt.

Hygiene ergibt sich von selbst.

Um Kreuzinfektionen zu verhindern, gibt es kaum ein effizienteres Mittel, als Berührung zu vermeiden. Alle häufig benötigten Funktionen lassen sich bequem während der Behandlung per Fußbedienung steuern. Darum verhindert der intelligente KaVo Fußanlasser auch Keimübertragungen in Ihrer Praxis.

Völlig frei positionierbar – der innovative Funk-Fußanlasser.

Optional zu dem Fußanlasser mit Kabel können Sie bei Ihrer KaVo ESTETICA E80 einen kabellosen Funk-Fußanlasser wählen und damit noch mehr Bewegungsfreiheit genießen. Die Funktionen und das überragende Bedienkonzept sind identisch mit denen des kabelgebundenen Geräts, so dass eine Umgewöhnung für Sie entfällt. Dank KaVo-eigener, innovativer Funktechnologie arbeitet Ihr kabelloser Fußanlasser völlig störungsfrei und sicher. Sein Hochleistungsakku fasst Energie für rund zwei Monate, die Aufladezeit beträgt dennoch nur drei Stunden. Selbstverständlich gibt es weder Selbstentladung noch Memory-Effekt, so dass Sie sich jederzeit auf Ihren Funk-Fußanlasser verlassen können.

Fußanlasser von KaVo – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Bedienung von Stuhl-, Instrumenten- und Multimedia-funktionen
- Keine Ermüdung dank Rechts-links-Bewegung
- Mühelos exakte Drehzahlsteuerung
- Verbesserte Hygiene, insbesondere Vermeidung von Kreuzinfektionen
- Überall frei platzierbar, dank des Schwebestuhl-Konzepts auch unter dem Patientenstuhl
- Kabelloser Funk-Fußanlasser (optional) mit verzögerungsfreier Signalübertragung für mehr Komfort und Hygiene



Wesentlich bequemer als „Gas und Bremse“: Die exakte Drehzahlsteuerung erfolgt über sanfte Rechts-links-Bewegungen Ihres Fußes. Ermüdungen und Muskelverspannungen gehören der Vergangenheit an.

Individualität ist die Basis für Persönlichkeit –
die KaVo ESTETICA E80.

Jeder Mensch verfügt über eine einzigartige Persönlichkeit, seinen eigenen Stil, seine ureigene Arbeitsweise. Daher sollte man bei der Wahl seines Werkzeugs darauf bestehen, dass es ist wie man selbst – höchst individuell. Am besten man setzt sich selbst als Maßstab. Da sich Individualität nicht standardisieren lässt, wird die KaVo ESTETICA E80 für jeden Zahnarzt auf dessen Wünsche abgestimmt. Die gesamte Einheit spiegelt so den Arzt und seine Persönlichkeit wider.

Die Einheit spricht die Sprache Ihrer Räume –
brillante Farben und innovatives Design.

**Modern, klassisch, warm oder nüchtern –
auf jeden Fall individuell.**

Sie entscheiden über das Ambiente in Ihrer Praxis. Sind Sie eher der klassische Typ oder wollen Sie mit Ihrer eigenen Farbkombination Akzente setzen? Verleihen Sie Ihrem Charakter mit der KaVo ESTETICA E80 Ausdruck – sie stellt sich individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Ihre räumlichen Gegebenheiten ein.

Gestaltet für das Jetzt und für die Zukunft bietet Ihnen Ihre KaVo ESTETICA E80 nicht nur die Technik, sondern auch das Design für höchsten Investitionsschutz. Klassische Formen und die Farbwahl, die Sie bestimmen, sorgen für die Umgebung, in der bei Ihnen selbst sowie bei Assistenz und Patienten ein angenehmes Gefühl geweckt wird.

Farben und Design –
Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Mehr als zehn verschiedene Lack- und Polsterfarben
- Individuelle Farbkombinationen
- Zeitlos moderne, hochwertige Formen




Wählen Sie Ihre persönliche KaVo ESTETICA E80 aus über 100 möglichen Varianten.

Wie man sich bettet, so liegt man – mehr Ausstattung, mehr Komfort.

Entspannt und komfortabel – in jeder Lage.

Ältere Patienten haben andere Ansprüche als jüngere oder als Kinder. Dies ergibt sich schon allein aus den unterschiedlichen körperlichen Gegebenheiten. Die KaVo ESTETICA E80 unterstützt Sie durch ein Plus an Variabilität, sodass sich jeder einzelne Ihrer Patienten bei der Behandlung wohl fühlen kann. Durch die Stammlängenverstellung und die motorische Sitzbankanhebung ist Ihre KaVo ESTETICA E80 an jede Körpergröße perfekt anpassbar.

Geräuschoptimierte Antriebe sorgen dafür, dass Ihre Patienten bei den Bewegungen der Behandlungseinheit nicht erschrecken. Für Ihre bevorzugte Behandlungsposition wählen Sie das passende Rückenpolster.

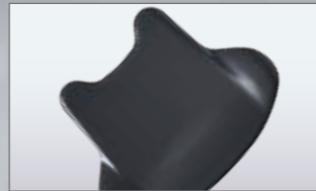

Rückenlehne Progress: Richtige Arbeitshaltung und optimaler Zugang für den Zahnarzt, speziell bei Kinderbehandlungen. Bequeme Position für Personen bis 1,90 m.



Rückenlehne Comfort: Maximaler Komfort und breite Schulterauflage für Patienten. Gute Schulterunterstützung für Personen bis 1,95 m.

Die Entscheidung trifft der Kopf.

Die Position des Patientenkopfes und –mundes entscheidet darüber, wie bequem der Behandelte liegt und wie gut Sie behandeln können. Darum ist die Kopfstütze der KaVo ESTETICA E80 in Form und Bewegungsweise so konstruiert, dass Sie den Kopfneigungswinkel stufenlos einstellen können. Die Fixierpositionen sind genau der Anatomie angepasst. Die Einstellungsart bestimmen Sie: einfach motorisch oder manuell mit pneumatischer Klemmung.



Sie haben die Wahl zwischen manuell oder motorisch einstellbarer Kopfstütze.

Bei der Rückenlehne Comfort sorgt die Längseinstellung über die integrierte Stammlängenverstellung für optimierte Ergonomie und maximalen Komfort für Ihre Patienten.



Patientenlagerung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Zwei Rückenlehnen mit Softpolster zur Auswahl
- Kopfstützen: motorisch oder manuell einstellbar
- Armlehne links oder rechts nach Wahl
- Stammlängenverstellung und Kreisbogensegment

Schärfen Sie Ihren Blick für das Wesentliche – Multimedia-Systeme mit Mehrwert.

Vernetzung leicht gemacht – mit ERGOcom light.

Verbinden Sie ganz einfach Ihre Systeme: Praxisrechner, Behandlungseinheit und weitere Medienquellen. Auf diese Weise erhalten Sie unter anderem den letzten Befund Ihres aktuellen Patienten direkt auf das 17" Display Ihrer KaVo ESTETICA E80 – und die dazugehörigen Röntgen-, Mikroskop- und Kameraaufnahmen oder Bilder vom PC. Sofort und ohne dass Sie oder Ihre Assistenz den Raum verlassen müssen. ERGOcom light ist Ihre einfache, optionale Lösung dafür.

Damit Sie Ihr ERGOcom light verwenden können, benötigen Sie weder PC-Anbindung, noch müssen Sie Kabel verlegen lassen. Die Funktionen können Sie sowohl per Fußanlasser als auch über das Arztelement Ihrer KaVo ESTETICA E80 steuern.

Mehr Licht, mehr Schärfe – intraorale Bilder in höchster Qualität.

Mehr sehen heisst mehr erkennen. Perfekte intraorale Bilder unterstützen Sie optimal bei der Behandlung Ihrer Patienten. Die neue Intraoralkamera KaVo ERGOcam erstellt Detailaufnahmen mit höchster Tiefenschärfe und hervorragender Farbwiedergabe. Mittels modernster CMOS-Chip Technologie erhalten Sie Bilder in höchster Qualität, insbesondere auch im Bereich der Gingiva. Die Handhabung ist mit Schieberegler und definierten Fokuspositionen einfach und komfortabel zugleich.

ERGOcom light Multimedia – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Kamerabilder auch ohne PC darstellbar
- Darstellung von vier Kamerabildern gleichzeitig
- PC-, Mikroskop- und Röntgenbilder auf dem Display der Dentaleinheit
- Hygienische Bedienung per Fußanlasser

Die Intraoralkamera ERGOcam liegt ergonomisch perfekt in der Hand und ihre 40.000 LUX sorgen für eindrucksvolle Bildergebnisse.



Erklären Sie Ihren Patienten Ihre Diagnose und die Arbeitsschritte anhand präziser Detailaufnahmen oder dokumentieren Sie Ihre Behandlung.




So schön kann gesundes Sitzen sein.

Hier dreht sich alles um Ihren Rücken.

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Und nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr, wie der Arbeitsstuhl auf dem Sie täglich sitzen.

Produkte mit einem Höchstmaß an Ergonomie und Komfort bietet KaVo seit jeher an. So ist auch der neue KaVo PHYSIO Evo exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Assistenten ausgerichtet.

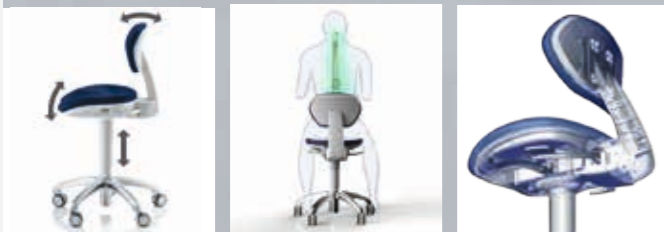

Ergonomie und Komfort in Perfektion: Mit dem KaVo PHYSIO Evo sitzen Sie immer in gesunder, natürlicher Haltung.

Eine Frage der richtigen Einstellung.

Das intelligente Stuhlkonzept des KaVo PHYSIO Evo erfüllt höchste Ansprüche an eine ergonomische Sitzposition. Dank getrennter Einstellfunktionen lassen sich Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren persönlichen Behandlungsstil anpassen. Reibungslose Arbeitsabläufe und größtmöglicher Sitzkomfort werden damit bei jeder Behandlung selbstverständlich.

Ergonomie steckt im Detail.

Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage bietet viel Bewegungsfreiheit.

Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird die Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont.

Ein ausgezeichnetes Konzept.

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



Innovatives Design in überzeugender KaVo Qualität.

Gesundes Sitzen mit Form und Farbe.

Der KaVo PHYSIO Evo hat eine schlanke, moderne Bauweise und bietet eine große Farbvielfalt. Die kompakte Bauweise und der geringe Durchmesser des Fußkreuzes bieten viel Bewegungsfreiheit selbst auf engstem Raum. Das Farbspektrum des KaVo PHYSIO Evo ist auf die Farben der Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E80, E70 und E50 abgestimmt.

Darauf können Sie setzen – Qualität made by KaVo.

Hochwertige Materialien in bester KaVo Verarbeitungsqualität und umfassende Dauertests garantieren eine lange Haltbarkeit. Auch bietet der KaVo PHYSIO Evo eine schnelle und zuverlässige Hygiene: Alle verarbeiteten Komponenten sind mit geringsten Spaltmaßen zusammengefügt und die Oberflächen lassen sich einfach reinigen.

Dental Excellence rechnet sich.

Eine ergonomisch gesunde Sitzhaltung kann maßgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis haben. Denn dauerhaft beschwerdefrei in gesunder Haltung zu arbeiten ist für Sie und Ihre Mitarbeiter auf lange Sicht unbezahlbar.

Alle Vorteile auf einen Blick.

- Perfekte Ergonomie bei höchstem Sitzkomfort für dauerhaft gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- KaVo Qualität in perfekter Verarbeitung für reibungslose Zuverlässigkeit im täglichen Praxisablauf
- Attraktive Farben und modernes Design zur individuellen Praxisgestaltung
- Beste Hygiene dank präziser abgestimmter Komponenten mit geringen Spaltmaßen und reinigungsfreundlichen Oberflächen



Ein extrem schlankes Fußkreuz für viel Bewegungsfreiheit und weiche, gebremste Rollen für kontrollierte Rollbewegungen.



Heute schon für morgen gerüstet – so arbeiten Sie in Zukunft.

Natürlich, innovativ und komfortabel – das 5-Sterne-Licht für Ihre Praxis.


Eine Behandlungsleuchte, die Ihre Sichtweise verändern wird: KaVoLUX 540 LED sorgt mit bis zu 40.000 LUX aus dem einzigartigen optischen System und vier verschiedenfarbigen LEDs für natürlich weißes Licht in höchster Qualität. Das gleichmäßige, schattenfreie Lichtfeld bietet höchsten Behandlungskomfort. Der überragende Farbwiedergabewert ermöglicht Ihnen zudem einen exakten Abgleich von Zahn- und Kompositfarbe mit Hilfe der Behandlungsleuchte direkt an Ihrer KaVo ESTETICA E80. Die Farbtemperatur der KaVoLUX 540 LED lässt sich in fünf Stufen individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen und der innovative COMPOsave Modus filtert sämtliche Blauanteile des Lichts heraus und verlängert so das Aushärten des Füllmaterials. Ohne das Licht dimmen zu müssen, können so lighthärtende Materialien entspannt bearbeitet werden. Mit dem arretierbarem 3D-Gelenk ist die KaVoLUX 540 LED höchst variabel einstellbar und durch ihre berührungslose Bedienung sowohl komfortabel als auch hygienisch.



Einfach hygienisch: Abnehmbare Griffe und glatte Oberflächen erlauben eine schnelle und gründliche Desinfektion. Die berührungslose Bedienung sorgt für ein minimales Risiko von Kreuzkontaminationen und maximale Sicherheit für Ihre Patienten.

SMARTdrive befördert Sie kraft- und gefühlvoll in die Zukunft.

Präzises, effizientes und zeitsparendes Arbeiten bietet die neue Motorsteuerung SMARTdrive mit voller Durchzugskraft und besonders vibrationsfreiem Anlaufverhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich von 100 min⁻¹. Durch den erweiterten Drehzahlbereich sind nun auch Kariesentfernung oder Polieren mit nur einem Winkelstück möglich. Somit entfällt das häufige Umrüsten des Winkelstücks und Sie sparen wertvolle Zeit während der Behandlung. Des Weiteren sparen Sie Investitionen in stark reduzierende Winkelstücke, da Sie mit dem SMARTdrive einen großen Drehzahlbereich abdecken können.

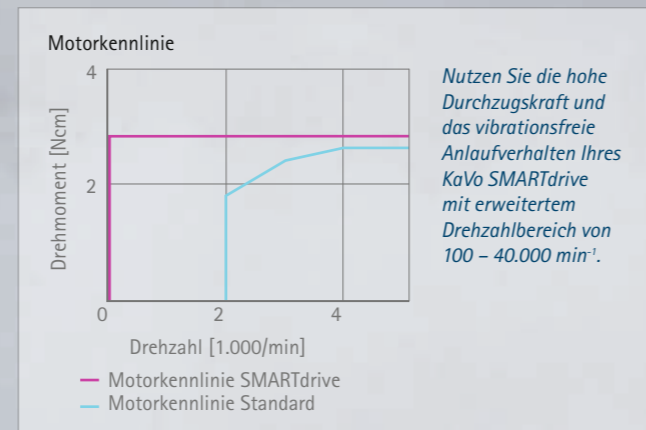

Ein Highlight auch in Sachen Sicherheit und Hygiene: abnehmbare, thermodesinfizierbare Griffe und ein geschlossenes Gehäuse mit glatten Oberflächen.



reddot design award winner 2012

red dot design award: Das Design Ihrer KaVoLUX 540 LED ist perfekt durchdacht. Sie ermöglicht ideale Arbeitsbedingungen durch modernste LED Technologie, die ein perfektes Licht für höchste Ansprüche liefert. „red dot“ steht für innovative Produktlösungen und hohe Qualität.

Evolution ist eine Frage der Anpassung – und der Ausstattung.

Arzt- und Assistenzelement zeigen höchste Flexibilität.

Sie wissen genau, was Sie wollen? In Sachen Instrumentierung sind Ihnen sowohl beim Arzt-, als auch beim Assistenzelement praktisch keine Grenzen gesetzt. Statten Sie sich und Ihre Mitarbeiter so aus, wie es Ihrer Arbeitsweise am besten entspricht. Die KaVo ESTETICA E80 stellt sich selbstverständlich auf Ihre persönlichen Spezialisierungen und die Ihres Teams ein und ist offen für zukünftige Instrumente und Erweiterungen.

Bestens für die Zukunft gerüstet.

Unabhängig davon, wo Ihr Behandlungsschwerpunkt liegt, oder ob Sie das gesamte Spektrum nutzen wollen – Ihre KaVo ESTETICA E80 passt sich ganz Ihren Bedürfnissen und Wünschen an: ob Endodontie, Chirurgie und Kochsalzlösungspumpe, Röntgenbildhalter, Multifunktionsspritze, und vieles mehr. Ihnen steht die Welt der Ausstattungen offen. Als universelle Schnittstellen sind die Kupplungssysteme MULTIFlex und INTRAMatic Ihres Arztelements wahre Multitalente.

Erleben Sie die Zukunft und ein völlig neues und entspanntes Arbeiten mit KaVo COMFORTdrive oder dem neuen und leistungsstarken Mikromotor KaVo INTRA LUX KL 703 LED und spüren Sie die neue Balance aus Leichtigkeit und Leistung für noch mehr Präzision in jedem Arbeitsschritt.

Individuelle Bestückung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- KaVoLUX 540 LED mit natürlichem Licht in höchster Qualität und komfortabler, berührungsloser Bedienung
- Flexible Ausstattungsmöglichkeiten für Arzt- und Assistenzelement
- Integriertes SMARTdrive für präzises Arbeiten im niedrigen Drehzahlbereich
- Unterstützung unterschiedlichster Behandlungsschwerpunkte, je nach Bedarf
- Zukunftssichere, standardisierte Schnittstellen für problemlose Anwendung und Erweiterung
- Breite Auswahl an intelligenten Zusatzausstattungen, auch später nachrüstbar



Höchstleistung auf den Punkt gebracht – KaVo INTRA LUX KL 703 LED.

Beeindruckend in Leistung und Handling – KaVo INTRA LUX KL 703 LED.

Mit dem neuen wartungsfreien, kollektorlosen Mikromotor KaVo INTRA LUX KL 703 LED erleben Sie Höchstleistung in Reinform. Er ist SMARTdrive optimiert und bietet ein breites Drehzahlspektrum von 100 bis 40.000 min⁻¹ bei einfacher Übersetzung. Durch sein um 30 % reduziertes Gewicht und seine um 25 % kleinere Bauform liegt er perfekt in der Hand und sorgt für optimale Balance bei perfekter Gewichtsverteilung. Er bietet mehr als ausreichend Leistung in jeder Behandlungssituation und sorgt für spürbar präziseres Handling bei gleichzeitig ermüdungsfreierem Arbeiten. Für die einfache Hygiene ist der INTRA LUX KL 703 LED sterilisierbar und für die perfekte Sicht hat er eine langlebige 25.000 LUX LED gleich inklusive. Herausragende Leistungswerte für herausragende Behandlungsergebnisse in Serie.



KaVo INTRA LUX KL 703 LED: Noch kleiner, noch leichter und mit mustergültiger Gewichtsverteilung.



Kraft und Leistung in optimaler Balance – KaVo COMFORTdrive.

Stärker, schneller, leichter – KaVo COMFORTdrive.

Mit COMFORTdrive hat KaVo ein neues Instrumentenzeitalter eingeläutet. COMFORTdrive verbindet die Vorteile von Turbine und Schnellläufer in einer eigenständigen Lösung. Mit seinem Drehzahlbereich von 30.000 bis zu 200.000 min⁻¹ ist er für alle Präparationen geeignet und liegt dazu perfekt in der Hand. Der Schwerpunkt ist optimal ausbalanciert, so dass Ihre Hand und Ihre Finger wesentlich weniger belastet werden. Denn als erstes Winkelstück integriert KaVo COMFORTdrive den Motor direkt in das Instrument. Dadurch konnte das Gewicht von KaVo COMFORTdrive im Vergleich zu den Vorgängern um circa 40 % reduziert werden. Dies wirkt sich positiv auf die Gewichtsverteilung und die Belastung beim Arbeiten aus.

Behandeln Sie Ihre Patienten effektiv und zeitsparend mit PiezoLED.

Mit dem neuen PiezoLED Ultraschall-Scaler stellen Sie für Ihre Patienten eine hochpräzise und effektive Zahnreinigung sicher. Die integrierten Titansonotroden des PiezoLED sorgen für kontrolliert lineare Schwingungen, die eine zeitsparende und effektive Behandlung Ihrer Patienten ermöglichen. Zahn und Zahnfleisch bleiben durch das exakte Arbeiten auch in besonders filigranen Bereichen unberührt.



Zirkuläre Lichtemissionen bieten Ihnen optimale Sicht, und im Zusammenspiel mit dem leichten und ergonomischen Design behandeln Sie Ihre Patienten stets unter optimalen Bedingungen.

Individuelle Bestückung – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Verbesserter Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 40.000 min⁻¹
- Neueste Instrumententechnik mit COMFORTdrive für noch entspannteres und effizienteres Präparieren
- PiezoLED zur effektiven und zeitsparenden Patientenbehandlung

In der Kürze liegt die Kraft – bessere Balance für mehr Präzision.

Durch den integrierten Motor konnte die Gesamtlänge von KaVo COMFORTdrive im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten um 20 % verringert werden. Möglich ist dies erst durch den Wegfall des Übersetzungsgetriebes im Instrument. Klein und handlich – so werden Ihre Behandlungen noch problemloser und präziser durchführbar.

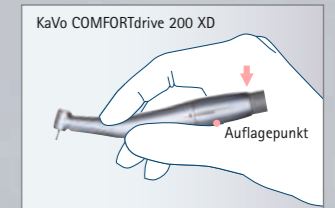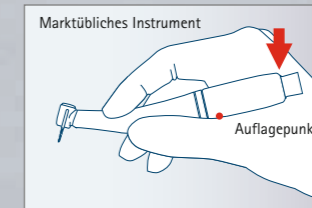

Die perfekte Balance für ermüdungsfreies Arbeiten: Der schwere Bereich hinter dem Auflagepunkt des Instruments bei KaVo COMFORTdrive ist deutlich geringer. Der Kraftaufwand während der Arbeit wird spürbar reduziert.

Das leichteste und handlichste elektrisch betriebene Dentalinstrument der Welt: KaVo COMFORTdrive.



PiezoLED: die innovative Ultraschall-Technologie für höchsten Standard in der Patientenbehandlung.

Gut gerüstet für Ihre Zukunft – das individuelle Trägersystem Centro.

Bessere Abläufe durch das Prinzip der kurzen Wege.

Mit dem Centro optimieren Sie Ihre persönliche Ergonomie. Alle Ihre Arbeitsschritte werden in einen harmonischen Prozess eingebunden. Das führt zu ruhigen, entspannten Arbeitsabläufen, was auch Ihre Patienten zu schätzen wissen. Der gemeinsame Mittelpunkt für wichtige Geräte ermöglicht Ihnen vollständig konzentriertes Arbeiten, Sie haben jederzeit alles im Griff.

Solide Voraussetzungen für die Zukunft Ihrer Praxis.

Centro ist mit seiner Zwei-Punkt-Befestigung an Boden und Decke absolut stabil. Es verfügt über zahlreiche Adapter, an denen Ihre Praxisgeräte befestigt werden. Vier durchgehende Installationskanäle und ein freier Einlegezugang räumen Leitungen aus dem Weg.

Auch investitionstechnisch ist Ihr Centro tragfähig für die Zukunft: Sie erhalten damit individuelle Konfigurierungs- und Erweiterungsoptionen für künftige Technologien, unabhängig von den unterschiedlichen Lebenszeiten der einzelnen Komponenten. Die technische Ausstattung kann immer auf dem neuesten Stand bleiben. Die Um- und Aufrüstung findet schnell und sauber statt – bei ungestörtem Praxisbetrieb.

Platz für alles, was Sie wünschen.

Wohin passt Ihre OP-Leuchte und wohin mit dem Röntgengerät? Wo ist der ideale Platz für Zusatzgeräte? Wie installiert man am besten das Mikroskop und wohin gehört der Monitor? Viele Fragen, auf die nur eine Antwort notwendig ist: Ihr Centro löst Ihre individuellen Anforderungen an Raum und Ordnung. Von der Beleuchtung bis hin zu Ablagetablets – Centro trägt Ihre zusätzlichen Geräte, ganz nach Ihren Wünschen.

Trägersystem Centro – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Modular, konfigurier- und erweiterbar, zukunftssicher
- Ergonomisch perfekt auf Arzt und Behandlungseinheit abgestimmt
- Unterstützung des gesamten Teams
- Solide, wackelfreie Konstruktion für präzises Arbeiten
- Mehr Ordnung durch verborgene Kabelführung
- Ersparnis anderer, evtl. aufwändigerer Installationsarten



Individuell bestückbar für individuelles Arbeiten – das Trägersystem Centro.

Effizienz, die sich auszahlt – die KaVo ESTETICA E80.

Patienten sind heute besser informiert denn je, und ihren Wünschen entgegenzukommen, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dabei darf die Kosteneffizienz jedoch nicht vergessen werden. Wie wirtschaftlich eine Behandlungseinheit ist, zeigen deren Leistungsdaten im Verhältnis zum Preis. Aber es geht noch weiter: Wirtschaftlichkeit erleben Zahnärzte hautnah, wenn z. B. Routinearbeiten der Assistenz überflüssig werden oder der optimierte Workflow allen spürbar Zeit schenkt.



Konzentrieren Sie sich nur auf das Wesentliche – dank perfektem Workflow.


Integrierte Technik verhilft Ihnen zu ungeahnten Höchstleistungen.

Sämtliche Arbeitsinstrumente sind sowohl für Sie als Behandler als auch für Ihre Assistenz vollständig eingebunden. Selbst Endo- und Chirurgiemotoren sind bereits integriert. Per USB-Schnittstellen können Sie weitere USB-taugliche Geräte einbinden und bleiben immer offen für die Zukunft. Konzentrieren Sie sich mit Ihrer KaVo ESTETICA E80 einfach ganz auf Ihre Arbeit. Alle schwenkbaren Elemente sind so positioniert und ausbalanciert, dass Sie bei jeder Bedienung die reibungslose Leichtigkeit Ihrer Bewegungen schätzen werden. Bei all diesen Abläufen befinden Sie sich aufgrund der ergonomischen Gestaltung der KaVo ESTETICA E80 so nah am Patienten wie nie zuvor.

Perfekter Workflow – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Komplette Integration aller Bestandteile, z. B. für Chirurgie, Röntgen etc.
- Abstimmung der Systeme aufeinander
- Umfassende Einstellmöglichkeiten aller Komponenten
- Informationssysteme für reibungslose Abläufe
- Sensorbremse im Arztelement
- Ausbalancierte Bewegungen

Wege mit konventioneller Behandlungseinheit.

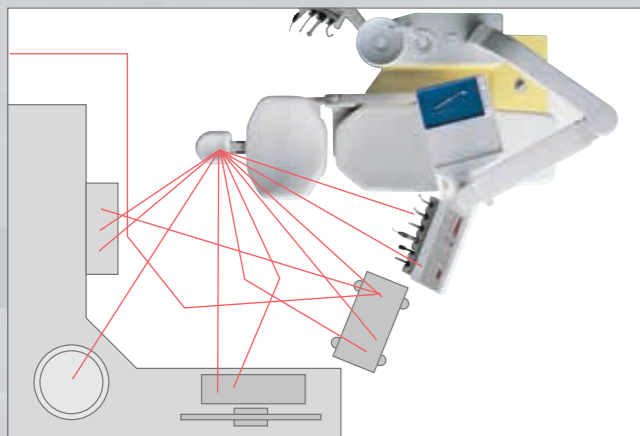

Workflow-Optimierung an Ihrem Arztelement.

Zur direkten Steuerung der Multimediaanwendungen Ihrer KaVo ESTETICA E80 verfügt die Bedienfolie in Ihrem Arztelement über eine vierte Ebene.


Der Servicetisch am Arztelement ist schwenkbar, und die Instrumente sind für Sie und Ihre Assistenz so bequemer erreichbar. Positionieren Sie das gesamte Arztelement mit seiner Sensorbremse noch genauer: Sie löst sich unmittelbar bei Berührung des Griffs und arretiert beim Loslassen.

Ideales Zusammenspiel auch in Ihrem Team.

Die reibungslose Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitenden sichert das flexibel platzierbare Assistenzelement. Es ist schwenkbar, höhenverstellbar, und die Bedienfolie verfügt über dieselbe Farb-codierung wie Ihr Arztelement. Die genaue Abstimmung von Assistenzelement, Arztelement und Patientenstuhl ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Instrumente – keine Umwege, keine Unterbrechungen.

Der optimierte Workflow verkürzt Ihre Wege bei der Behandlung messbar. Nutzen Sie, z. B. durch integrierte Endo- und Chirurgieantriebe, die entstehende Zeitersparnis individuell nach Ihrem Bedarf – weniger Wege durch integrierte Technik und optimierte Ergonomie.

Wege mit der neuen KaVo ESTETICA E80.

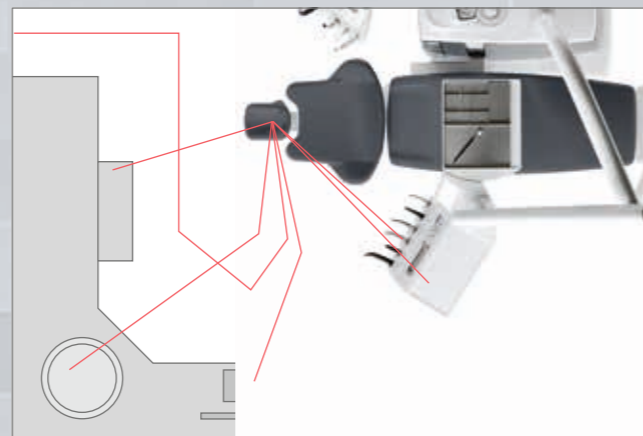

Perfektion bis ins kleinste Detail – überragende KaVo-Qualität, made in Germany.

Alle Bestandteile von bester Güte.

Bei der KaVo ESTETICA E80 erleben Sie höchste Funktionalität nicht nur in jedem Detail, sondern auch im gesamten Zusammenspiel der Bestandteile. Wie bei Ihrer Arbeit kommt es auf feinste Abstimmung und Abstufungen an. Nur diese hochwertige Fertigung erlaubt die Realisierung einer Behandlungseinheit für optimales und ungehindertes Arbeiten. Mit Ihrer KaVo ESTETICA E80 erhalten Sie diesen höchsten Qualitätsstandard.



Hochwertige Oberflächen und Materialien, verarbeitet in bewährter KaVo-Qualität.

Geprüfte Sicherheit und dauerhafte Verlässlichkeit.

In Langzeittests von überdurchschnittlicher Dauer wurde die KaVo ESTETICA E80 fehlerfrei geprüft. Selbst bei der Simulation mit extrem schwergewichtigen Patienten traten keinerlei Probleme auf. Natürlich wurde auch die Ergonomie kritischen Prüfungen erfahrener Praktiker unterzogen. Durch deren Mithilfe während der Entwicklungszeit hatten wir die Gelegenheit, unter anderem die individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Einheit für die unterschiedlichsten Anforderungen des Zahnarztalltags zu verfeinern und sie immer weiter zu optimieren. Mit bestem Ergebnis, wie von Dental Excellence zu erwarten, und geprüft und zertifiziert nach höchsten deutschen und internationalen Standards.

Überragende Qualität – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Präzise Verarbeitung nach höchsten Qualitätsstandards
- Solide Bauweise mit hochwertigsten Materialien
- Feinste Abstimmung und Abstufung aller Funktionen
- Größte Funktionssicherheit durch umfassende Dauertests



Hochwertige Oberflächen und Materialien, verarbeitet in bewährter KaVo-Qualität.

Mit Sicherheit betriebsbereit – integrierte, automatisierte Hygienefunktionen.

Automatische Hygienefunktionen verhindern Pflegefehler, schützen das Personal, sparen Zeit und erhöhen die Funktionssicherheit.



Hydroclean mit automatischer Desinfektion der Absaugwege.

Durch die automatisierte Hydrocleanfunktion werden das ganze Absaug- und Abflusssystem sowie die Absaugschläuche mit Wasser gereinigt und mit der vollautomatischen Dosierung von DEKASEPTOL Gel desinfiziert.

Damit entfallen manuelle Tätigkeiten, und Ihr Personal hat keinen Kontakt mit den Desinfektionsmitteln.

Zeitersparnis bei Intensiventkeimung.

Die Dauerentkeimung mit OXYGENAL 6 verhindert, dass sich Mikroorganismen im normalen Betrieb ausbreiten. Die Intensiventkeimung stellt eine einwandfreie Qualität der Kühl- und Sprühflüssigkeiten auch bei längerer Standzeit sicher. Eine Ringleitung im Arztelement sorgt dafür, dass das System permanent durchspült wird. Es gibt im gesamten Leitungssystem kein totes Leitungsende – und damit keine Sackgasse, in der sich die Keime festsetzen und verbreiten können.

Keine Chance für Keime dank permanenter Durchspülung des Ringleitungssystems.



OXYmat und DEKAmat – im Gerätekörper integriert – bringen jetzt standardisierte und automatisierte Hygiene in Ihre Praxis. Das bedeutet für Ihre Assistenz weniger manuellen Aufwand. Des Weiteren garantiert die automatisierte Pflege ein Plus an Funktionssicherheit.



Serienmäßige Nebenluftkanäle verhindern den Rückfluss kontaminierter Flüssigkeiten und schließen Kreuzinfektionen durch Reflux praktisch aus. Und das mit allen auf dem Markt befindlichen Standardkanülen.

Automatisches Spülprogramm gemäß RKI*.

Ein automatisiertes Spülprogramm erleichtert Ihnen das tägliche Spülen aller Wasser führenden Leitungen. Die variabel einstellbare Spülzeit wird einfach per Knopfdruck aktiviert.

Besserer Schutz durch Rücksaugstopp.

Das Wasserversorgungssystem wird außerdem durch den Rücksaugstopp an KaVo Instrumenten und Motoren geschützt. Das schützt den Patienten und verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Behandlungseinheit gesaugt wird.

Mehr Sicherheit durch abnehmbare Geräteteile.

Auch dort, wo die Hand ins Spiel kommt, hat KaVo mitgedacht: Oft angefasste Geräteteile wie Griffe, Instrumentenaufnahmen oder Mundspülbecken sind abnehmbar. Sie lassen sich nach Anforderung reinigen, desinfizieren oder sterilisieren, sodass eine Kreuzkontamination ausgeschlossen ist.

Höherer Komfort durch motorisch schwenkbares Mundspülbecken.

Durch Wahl der Spülposition schwenkt das Mundspülbecken automatisch zum Patienten und erleichtert somit das Ausspülen. Das Becken schwenkt automatisch in die Ausgangsposition zurück, sobald sich der Patient wieder in die Behandlungsposition begibt.


Wichtige Bestandteile, wie z. B. Porzellanmundspülbecken, Becherfüllrohr und Abdeckungen, sind thermodesinfizierbar.



Zeitsparende Hygiene – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Automatisierte und standardisierte Hygiene
- Zeitsparende und einfache Reinigung
- Abnehmbare Geräteteile

* Robert-Koch-Institut, Berlin.

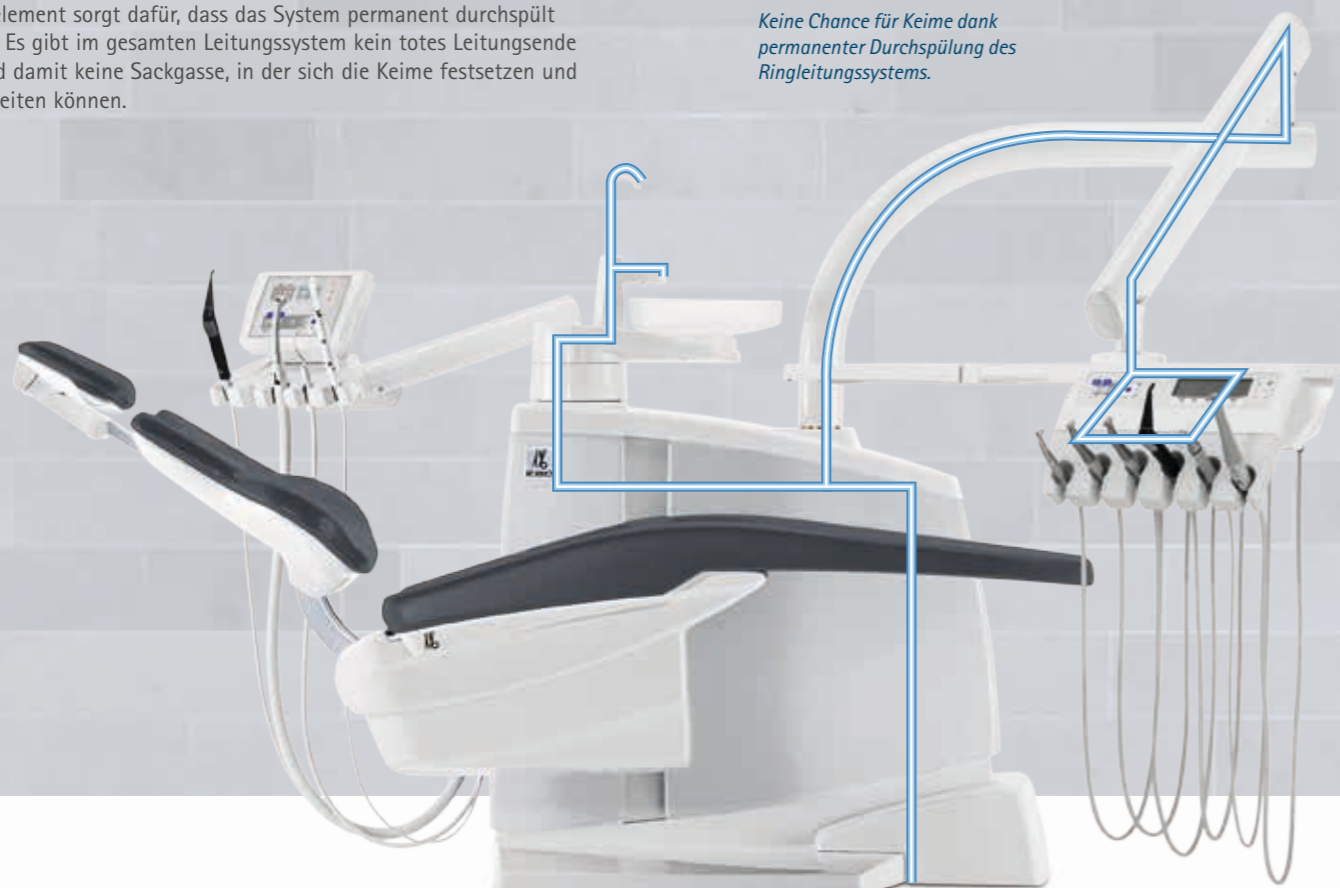

Ganz nach Ihren Bedürfnissen – die Ausstattungsoptionen.

	ESTETICA E80 T	ESTETICA E80 C		ESTETICA E80 T	ESTETICA E80 C
Patientenstuhl			Assistenzelement		
Mot. Horizontalverschiebung	●	●	Spraynebelabsaugung	●	●
Mot. Sitzbankanhebung	●	●	Speichelzieher	●	●
Softpolster	●	●	Zweiter Speichelzieher	○	○
			Dreifunktionshandstück	○	○
Rückenlehne			Mehrfunktionshandstück	○	○
Comfort	x	x	Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED	○	○
Progress	x	x	Hydrocolloid-Anschluss	○	○
			USB-Schnittstelle	●	●
Kopfstütze			Trayhalter für Tablettaufnahme	○	○
2-Gelenk pneumatisch	●	●	Höhenverstellbarer Arm	●	●
SOMATIC E-motorisch	○	○	DIAGNOdent-Halter	○	○
			Gerätekörper		
Armlehne			Mundspülbecken in Glas	x	x
Rechts	○	○	Mundspülbecken in Porzellan	x	x
Links	○	○	Mundspülbecken motorisch	●	●
Arztelement			Dauerentkeimung	●	●
1. Turbinenschlauch	●	●	Intensiventkeimung	●	●
2.-5. Turbinenschlauch	○	○	HYDROclean	●	●
1. KL-Motor 703 LED	●	●	DEKAmat und OXYmat	●	●
2.-5. KL-Motor 703 LED	○	○	Warmwasserboiler	●	●
Endofunktion	○	○	VACUstopp	●	●
COMFORTbase	○	○	Funk-Fußanlasser	○	○
Mehrfunktionshandstück	●	●	Versorgungssystem		
PiezoLED Ultraschall-Scaler	○	○	Wasserblock DVGW	●	●
Sprayerwärmung Instrumente	●	●	Zusatzgeräteanschluss	○	○
Rücksaugstopp für Instrumente	●	●	AQUAmat	●	●
Multifunktionsdisplay Memodent	●	●	Entsorgungssystem		
HF-Elektrochirurgie	○	○	Externe Absaugung	●	●
ERGOcam	○	○	DÜRR Amalgamabscheider	○	○
Kl. Röntgenbildbetrachter	○	○	DÜRR Separierautomatik	○	○
Gr. Röntgenbildbetrachter	○	○	Sonstiges		
Physiologische Kochsalzlösung	○	○	KaVo PHYSIO Evo	○	○
Chirurgiemotor SL 550	○	○	Servicetisch 1568	-	○
Verstellbarer Servicetisch für zwei Normtrays	●	-	KaVoLUX 540 LED	○	○
USB-Schnittstelle	●	●	Leuchtaufbaustange	○	○
Pneumatische Bremse für Armsystem	●	-	ERGOcom light	○	○
Tablettaufnahme für zwei Normtrays	-	x	DEKASEPTOL Gel-Basisset	●	●
Tablettaufnahme für ein Normtray	-	x			



Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED



PiezoLED Ultraschall-Scaler



Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED



KaVoLUX 540 LED



KaVo Elektrochirurgiegerät



DIAGNOdenthalter für Assistenzelement



KaVo Funk-Fußanlasser



Fremdgeräteanschluss: einfache Versorgung von Zusatzgeräten mit Wasser, Luft und Strom



Arbeitsstuhl KaVo PHYSIO Evo



Kleiner Röntgenbildbetrachter, 5 x 5 cm



Panorama-Röntgenbildbetrachter: am Zahnarztelement oder am Servicetisch positioniert



Anbau physiologischer Kochsalzlösung: für chirurgische Eingriffe, Steuerung über Fußanlasser

● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung x Muss gewählt werden - Nicht lieferbar

Weitere Informationen unter www.kavo.com/e80

KaVo ESTETICA® E80



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1103 · www.kavo.com