

PEOPLE HAVE PRIORITY



Gebrauchsanweisung



CE
0297

synea^{VISION}

Handstück

HK-43 LT

Winkelstücke mit Licht

WK-99 LT, WK-93 LT, WK-56 LT, WK-66 LT, WK-86 LT

Inhaltsverzeichnis

W&H Symbole	3 – 4
1. Einleitung	5 – 7
2. Sicherheitshinweise	8 – 9
3. Produktbeschreibung	10 – 11
4. Inbetriebnahme	12 – 17
Aufstecken / Abnehmen, Wechseln des rotierenden Instrumentes, Probelauf	
5. Hygiene und Pflege	18 – 29
Allgemein, Vordesinfektion, Manuelle Reinigung, Manuelle Desinfektion, Maschinelle Reinigung und Desinfektion, Ölpflege, Sterilisation	
6. W&H Accessoires	30
7. Technische Daten	31 – 34
8. Recycling und Entsorgung	35
Garantieerklärung	37
Autorisierte W&H Servicepartner	39

W&H Symbole

Symbole in der Gebrauchsanweisung



WARNUNG!

(falls Menschen verletzt
werden können)



ACHTUNG!

(falls eine Sache
beschädigt
werden kann)



Allgemeine
Erläuterungen, ohne
Gefahr für Mensch oder
Sache



Nicht mit dem Hausmüll
entsorgen

 **UL** Prüfzeichen für
anerkannte Komponenten
für Kanada und die USA

W&H Symbole

Symbole auf dem Instrument

 CE 0297
vom Hersteller

 Thermodesinfizierbar

 Sterilisierbar bis zur
angegebenen Temperatur

 Herstellungsdatum



Data Matrix Code zur
Produkt-Identifikation, z. B.
im Hygiene-/Pflegeprozess

REF Bestellnummer

SN Seriennummer

1. Einleitung

Kundenzufriedenheit steht in der Qualitätspolitik von W&H an erster Stelle. Das vorliegende W&H-Produkt wurde gemäß den gültigen gesetzlichen und normativen Bestimmungen entwickelt, hergestellt und geprüft.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten

Lesen Sie bitte vor erstmaliger Anwendung die Gebrauchsanweisung. Diese soll Ihnen die Handhabung Ihres Produktes erklären und eine störungsfreie, wirtschaftliche und sichere Behandlung gewährleisten.

Zweckbestimmung

Das dentale Hand-/ Winkelstück ist für folgende Anwendungen bestimmt: Entfernung kariösen Materials, Kavitäten und Kronenpräparation, Entfernung von Füllungen, finieren und polieren von Zahn- und Restaurationsoberflächen.

Bestimmungswidriger Gebrauch kann das Hand-/ Winkelstück beschädigen und dadurch Risiken und Gefahren für Patienten, Anwender und Dritte verursachen.

Qualifikation des Anwenders

Bei der Entwicklung und Auslegung des Hand-/ Winkelstückes sind wir von der Zielgruppe »Zahnärzte/-innen, Dentalhygieniker/-innen, Zahnmedizinische Fachangestellte (Prophylaxe) und Zahnmedizinische Fachassistenten/-innen« ausgegangen.



Produktion nach EU Richtlinie

Das Hand-/ Winkelstück ist ein Medizinprodukt nach EU-Richtlinie 93/42/EWG



Verantwortlichkeit des Herstellers

Der Hersteller kann sich nur dann für die Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Hand-/ Winkelstückes als verantwortlich betrachten, wenn nachstehende Hinweise eingehalten werden:

- > Das Hand-/ Winkelstück muss in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.
- > Das Hand-/ Winkelstück besitzt keine für den Anwender reparierbaren Teile. Montage, Änderungen oder Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten W&H Servicepartner (siehe Seite 39) durchgeführt werden.

Fachkundige Anwendung

Das Hand-/ Winkelstück ist nur für fachkundige Anwendung in der Dentalmedizin gemäß den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsmaßnahmen und unter Beachtung dieser Gebrauchsanweisung bestimmt. Das Hand-/ Winkelstück darf nur von Personen aufbereitet und gewartet werden, die in Infektions-, Selbst- und Patientenschutz unterwiesen wurden. Unsachgemäßer Gebrauch (z. B. durch fehlende Hygiene und Pflege), die Nichteinhaltung unserer Anweisungen oder die Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht von W&H freigegeben sind, entbinden uns von jeder Garantieleistung oder anderen Ansprüchen.

Service

Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich sofort an einen autorisierten W&H Servicepartner (siehe Seite 39). Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem autorisierten W&H Servicepartner durchgeführt werden.

2. Sicherheitshinweise



- > Stellen Sie immer richtige Betriebsbedingungen und Kühlmittelfunktion sicher.
- > Stellen Sie immer ausreichende und geeignete Kühlmittel sicher und sorgen Sie für angemessene Absaugung. Setzen Sie das Hand-/ Winkelstück bei Ausfall der Kühlmittelversorgung sofort außer Betrieb.
- > Verwenden Sie als Kühlluft für das Hand-/ Winkelstück nur von Dentalkompressoren aufbereitete Luft, die gefiltert, ölfrei und gekühlt ist.
- > Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung das Hand-/ Winkelstück auf Beschädigung und lose Teile (z. B. Druckknopf).
- > Nehmen Sie das Hand-/ Winkelstück bei Beschädigung nicht in Betrieb.
- > Führen Sie vor jeder Anwendung einen Probelauf durch.
- > Vermeiden Sie Kontakt zwischen Instrumentenkopf und Weichgewebe (Verbrennungsgefahr durch Erhitzung des Druckknopfes).
- > Führen Sie einmal täglich die Spülfunktion der Dentaleinheit aus.



- > Der Betrieb des Winkelstücks mit Licht ist nur an Versorgungseinheiten gestattet, die den Normen IEC 60601-1 (EN 60601-1) und IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2) entsprechen.

Das verwendete Netzteil der Versorgungseinheit muss folgende Anforderungen erfüllen, die durch den Systemzusammensteller zu garantieren sind:


- > Die Einhaltung der Ableitströme des Anwendungsteiles ist durch den Systemzusammensteller zu garantieren.
- > Die Sekundärspannung muss erdfrei sein.
- > Die Sekundärstromkreise müssen gegen Kurzschluss sowie Überlast geschützt sein.

Hygiene und Pflege vor der erstmaligen Anwendung

Das Hand-/ Winkelstück ist bei Lieferung gereinigt und in PE-Folie verschweißt. Führen Sie vor der erstmaligen Anwendung eine Ölpflege durch. Sterilisieren Sie das Hand-/ Winkelstück, den Düsenreiniger sowie den Bohreranschlag und Gewindestift des Handstückes.


- > Ölpflege Seite 24
- > Sterilisation Seite 28

3. Produktbeschreibung Handstück

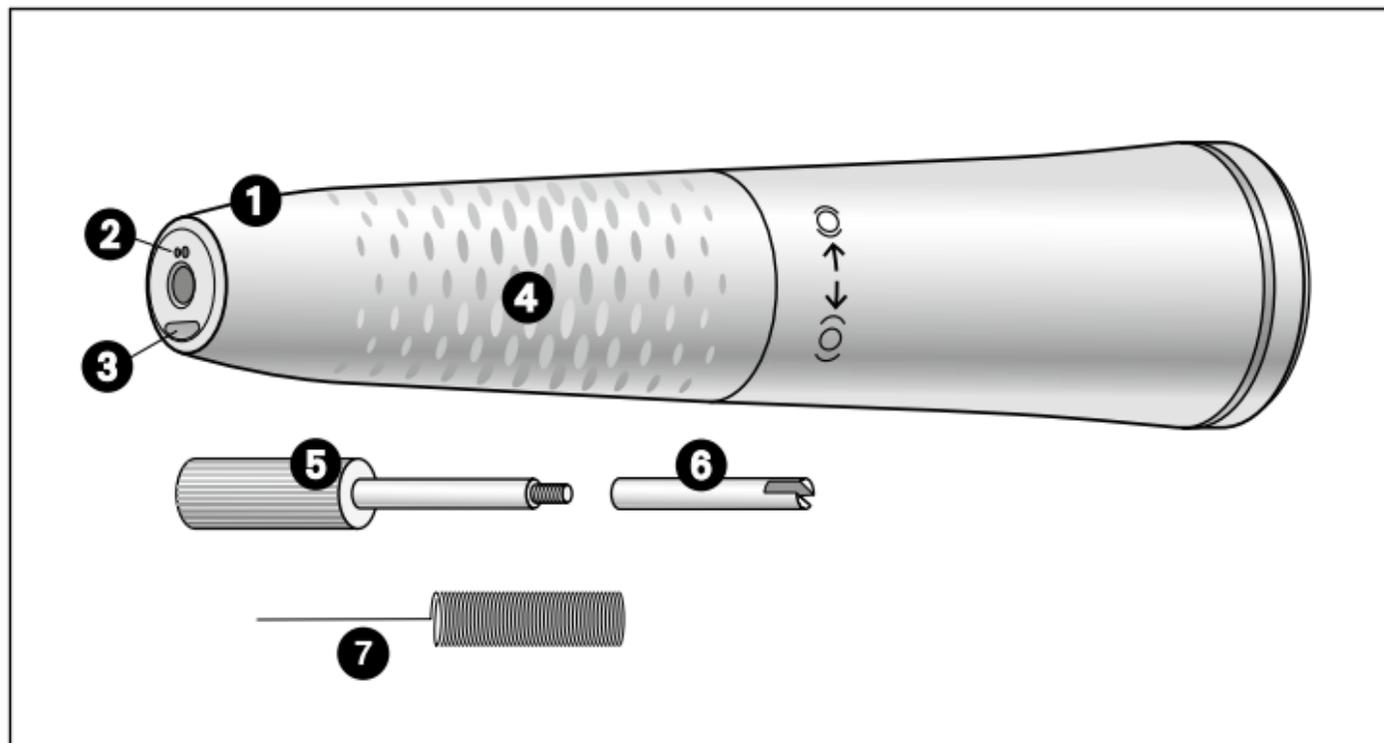


- ❶ Handstückhülse mit Drehspannung
- ❷ Spraydüsen
- ❸ Kompaktglasstab
- ❹ Griffprofil
- ❺ Gewindestift
- ❻ Bohreranschlag
- ❼ Düsenreiniger

Produktbeschreibung Winkelstück

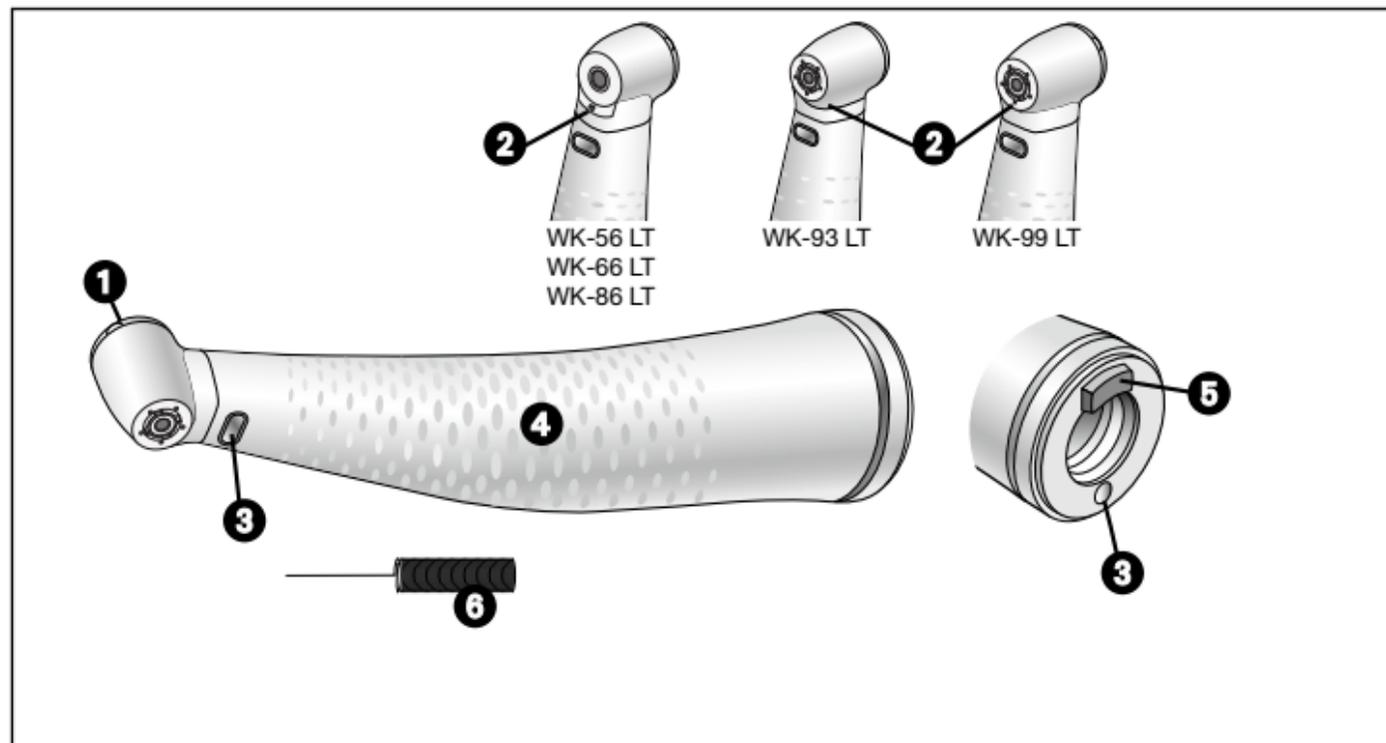

- ① Druckknopf
- ② Spraydüsen
- ③ Kompaktglasstab
- ④ Griffprofil
- ⑤ versenkbare Rastnase
- ⑥ Düsenreiniger

4. Inbetriebnahme – Aufstecken / Abnehmen

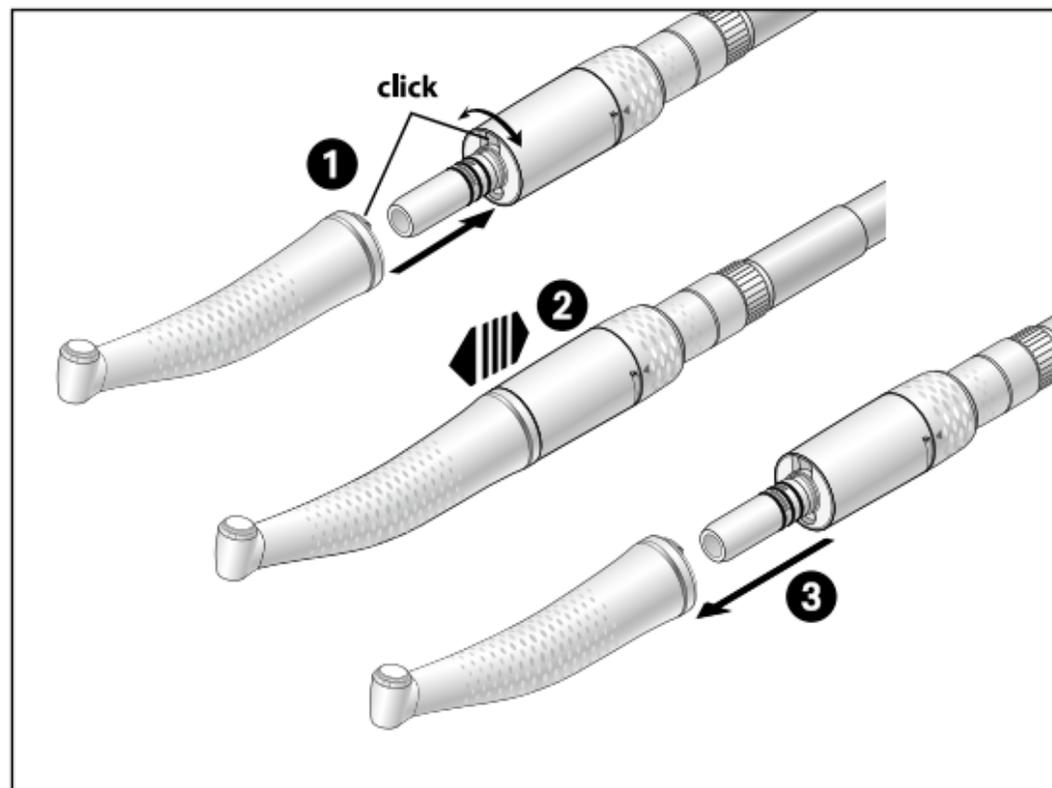


**Nicht während des Betriebes
aufstecken oder abnehmen!**

- 1** Stecken Sie das Hand-/ Winkelstück auf den Motor und drehen Sie bis es hörbar einrastet.
- 2** Prüfen Sie den sicheren Halt am Motor.
- 3** Nehmen Sie das Hand-/ Winkelstück durch axialen Zug ab.



Rotierende Instrumente


- > Verwenden Sie nur einwandfreie rotierende Instrumente deren Schäfte die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 1797-1 erfüllen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
- > Setzen Sie das rotierende Instrument nur bei stillstehendem Hand-/ Winkelstück ein.
- > Greifen Sie nie in das laufende oder auslaufende rotierende Instrument.
- > Betätigen Sie nie die Drehspannung des Handstücks oder den Druckknopf des Winkelstücks während der Anwendung oder des Auslaufens. Dies führt zum Lösen des rotierenden Instrumentes, zur Beschädigung der Drehspannung (Handstück) bzw. zum Heißwerden des Druckknopfes (Winkelstück) (Verletzungsgefahr).

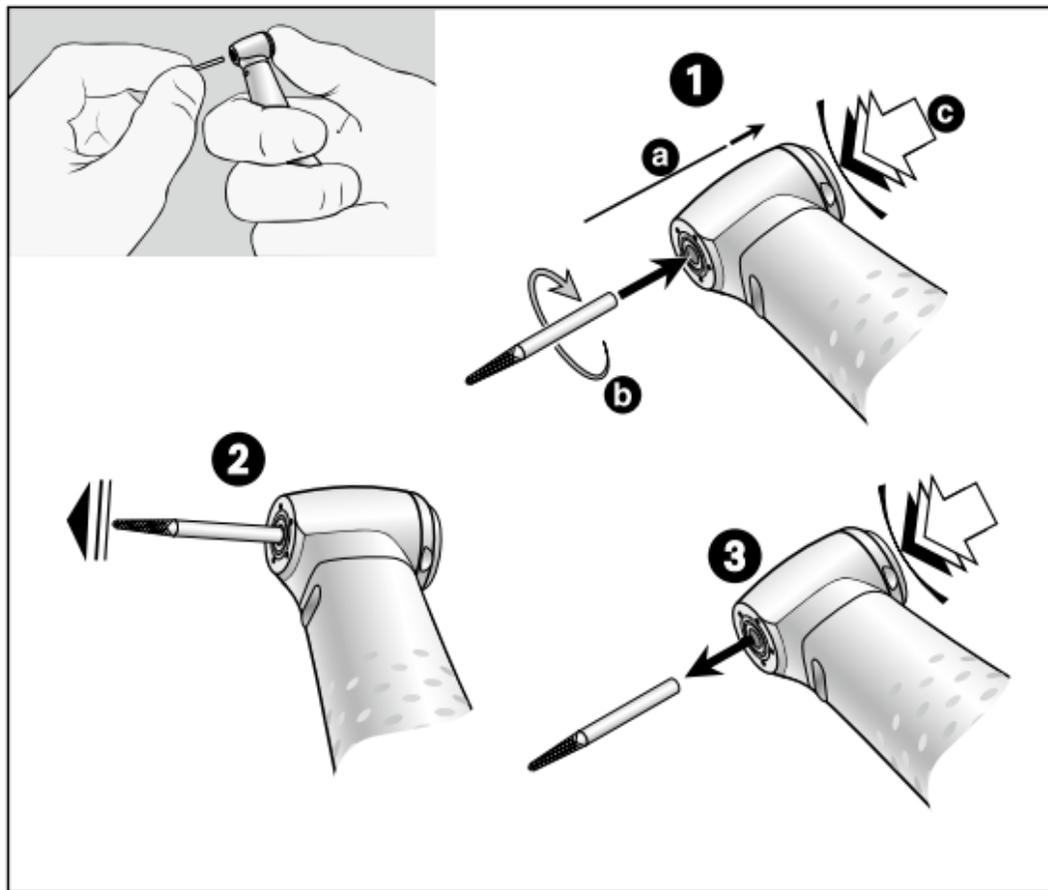

Winkelstück

Wechseln des rotierenden Instrumentes

- 1** Bohrschaft- \varnothing 1,6 mm:
Schieben Sie das rotierende Instrument ein.
Drücken Sie den Druckknopf (c) kräftig und schieben Sie gleichzeitig das rotierende Instrument bis auf Anschlag ein (a).
Bohrerschaft- \varnothing 2,35 mm: Drücken Sie den Druckknopf (c), schieben Sie gleichzeitig das rotierende Instrument ein und drehen Sie bis es einrastet (b).
- 2** Prüfen Sie den sicheren Halt durch axialen Zug.
- 3** Entnehmen Sie das rotierende Instrument durch Betätigen des Druckknopfes.

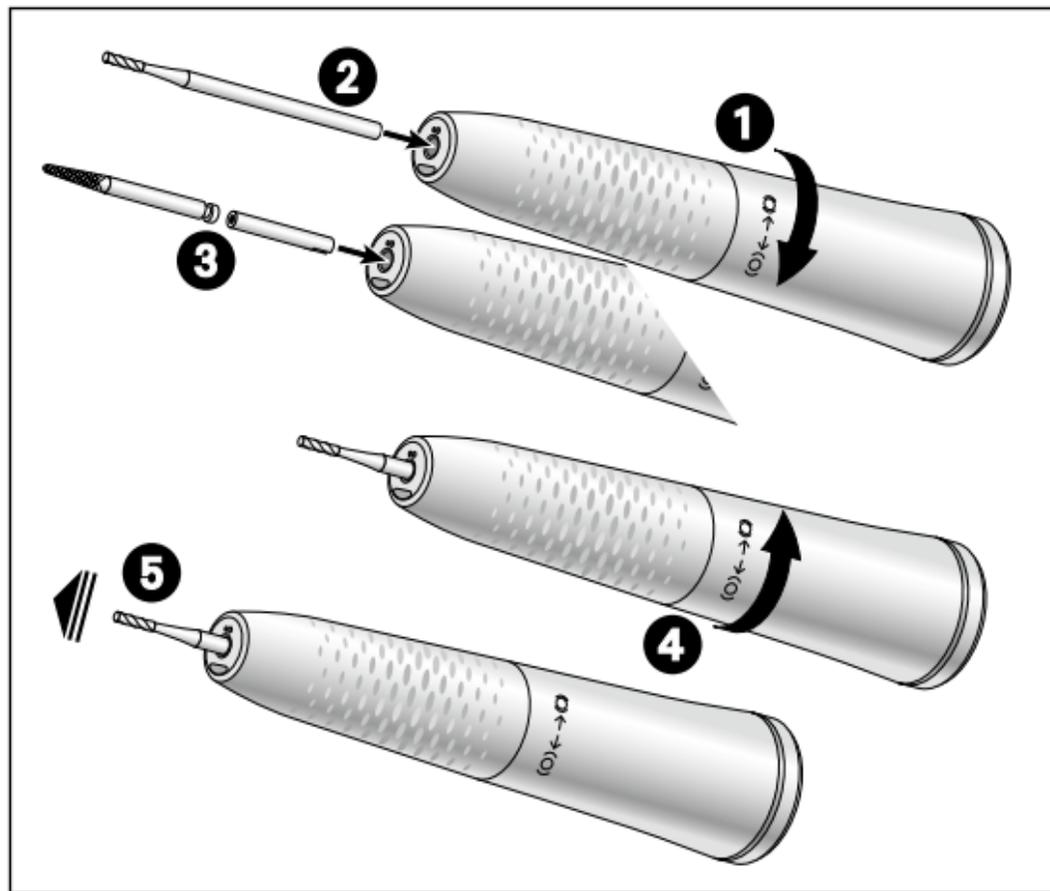

Handstück

Einsetzen des rotierenden Instrumentes


- 1** Drehen Sie die Handstückhülse in Richtung [O] bis zum Einrasten auf.
- 2** *Handstückbohrer:*
Setzen Sie das rotierende Instrument bis auf Anschlag ein.
- 3** *Winkelstückbohrer:*
Schieben Sie den Bohreranschlag ein und setzen dann das rotierende Instrument bis auf Anschlag ein. Der Bohreranschlag gleicht die Längendifferenz aus.
- 4** Drehen Sie die Handstückhülse in Richtung [O] bis zum Einrasten zu.
- 5** Prüfen Sie den sicheren Halt des rotierenden Instrumentes durch axialen Zug.

Probelauf



Halten Sie das Hand-/ Winkelstück nicht in Augenhöhe!

- > Setzen Sie das rotierende Instrument ein.
- > Starten Sie das Hand-/ Winkelstück.
- > Bei Funktionsstörungen (z. B. Vibrationen, ungewohnten Geräuschen, Heißwerden, Kühlmittelausfall bzw. Undichtheit) **setzen Sie das Hand-/ Winkelstück** sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an einen autorisierten W&H Servicepartner (siehe Seite 39).

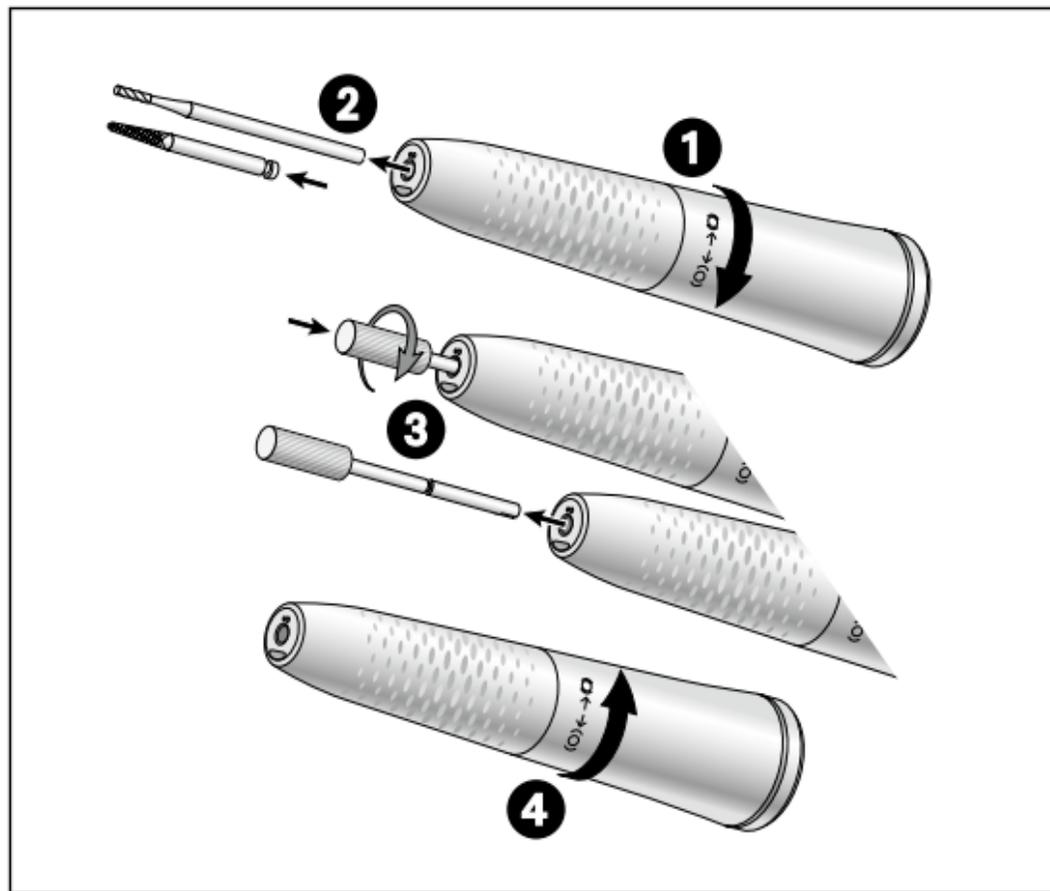

Handstück

Herausnehmen des rotierenden Instrumentes

- 1 Drehen Sie die Handstückhülse in Richtung (0) bis zum Einrasten auf.
- 2 *Handstückbohrer:* Nehmen Sie das rotierende Instrument heraus.
Winkelstückbohrer: Nehmen Sie das rotierende Instrument heraus .
- 3 Schrauben Sie den Gewindestift rechtsdrehend in den Bohreranschlag ein und ziehen diesen heraus.
- 4 Drehen Sie die Handstückhülse in Richtung (0) bis zum Einrasten zu.

5. Hygiene und Pflege



Beachten Sie Ihre länderspezifischen Richtlinien, Normen und Vorgaben für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation.

> Das Hand-/ Winkelstück kann manuell oder maschinell aufbereitet werden.



> Tragen Sie Schutzkleidung.


> Nehmen Sie das Hand-/ Winkelstück vom Motor ab.

> Nehmen Sie das rotierende Instrument heraus.

> Reinigen und desinfizieren Sie das Hand-/ Winkelstück **sofort nach jeder Behandlung**, um eventuell eingedrungene Flüssigkeiten (z. B. Blut, Speichel etc.) auszuspülen und ein Festsetzen der Innenteile zu vermeiden.

> Sterilisieren Sie das Hand-/ Winkelstück im Anschluss an die manuelle oder maschinelle Reinigung und Desinfektion sowie Ölpflege.

> Sterilisieren Sie den Düsenreiniger im Anschluss an die manuelle Reinigung und Desinfektion.

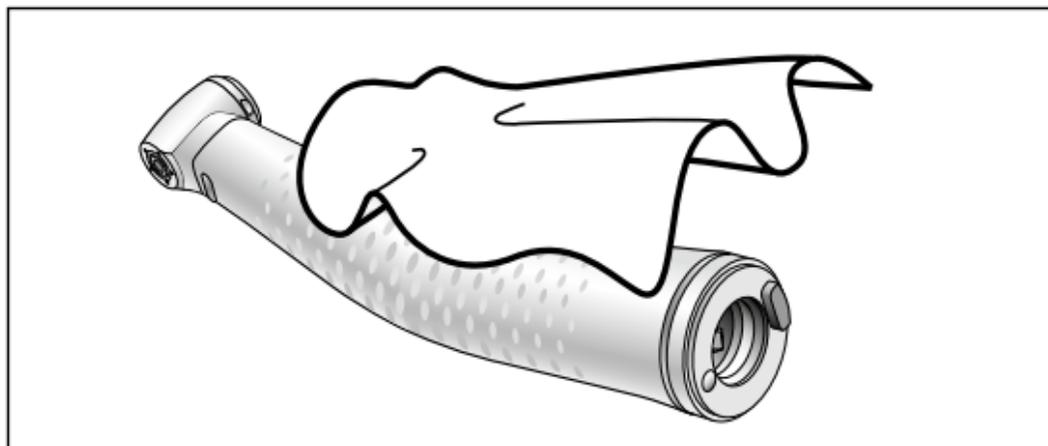


Vordesinfektion

- > Reinigen Sie bei stärkerer Verschmutzung mit Desinfektionstüchern vor.



Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel, die keine proteinfixierende Wirkung besitzen.


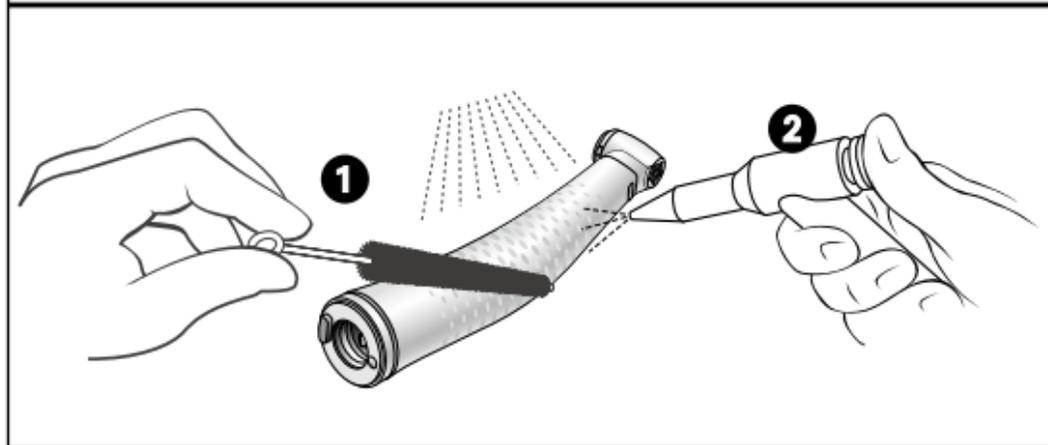


Manuelle Reinigung innen und außen

- 1 Abspülen und Abbürsten mit demineralisiertem Wasser (< 38 °C).
- 2 Entfernen Sie eventuelle Flüssigkeitsreste (Saugtuch, mit Druckluft trockenblasen).



Legen Sie das Hand-/ Winkelstück nicht in die Desinfektionslösung oder das Ultraschallbad!

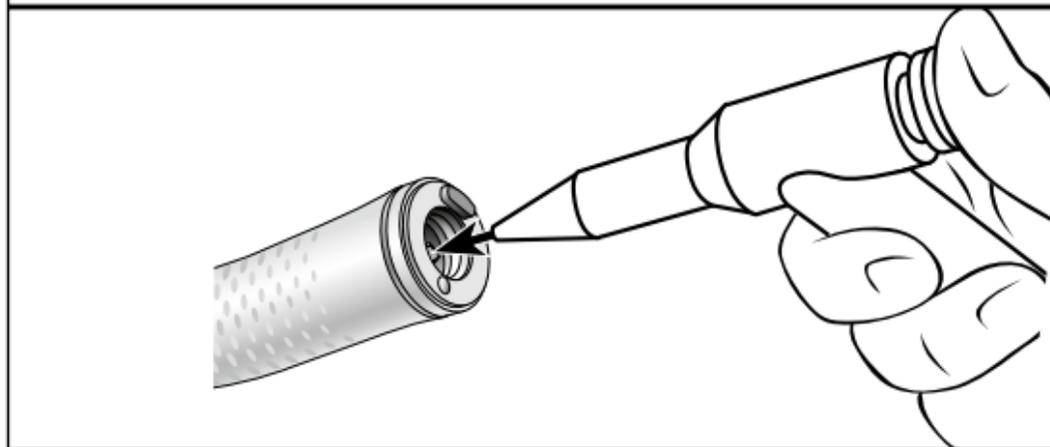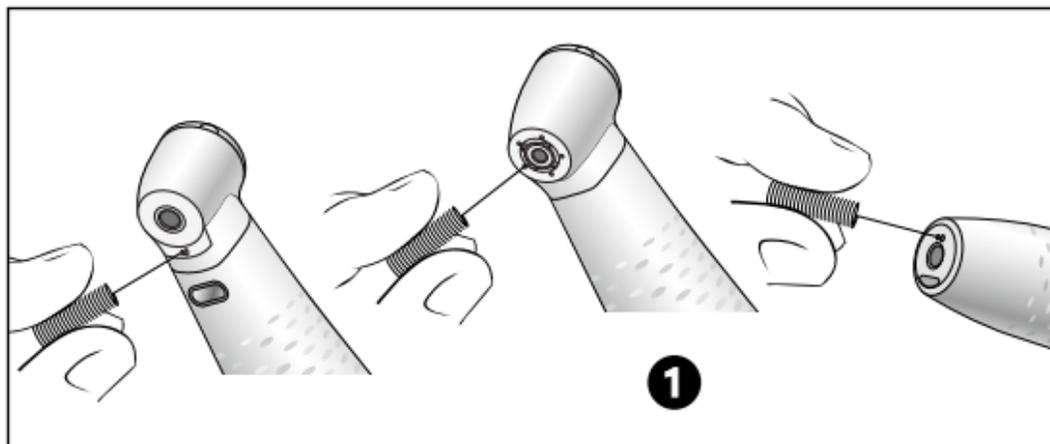

Spraydüsen reinigen

- ③ Reinigen Sie die Spraydüsen mit dem Düsenreiniger vorsichtig von Schmutz und Ablagerungen.




Reinigen und Desinfizieren Sie den Düsenreiniger im Ultraschallbad / Desinfektionsbad.

Kühlmittelkanal reinigen

- > Blasen Sie mit der Luftpistole den Kühlmittelkanal durch.



Bei verstopften Spraydüsen oder Kühlmittelkanälen wenden Sie sich an einen autorisierten W&H Servicpartner [siehe Seite 39].

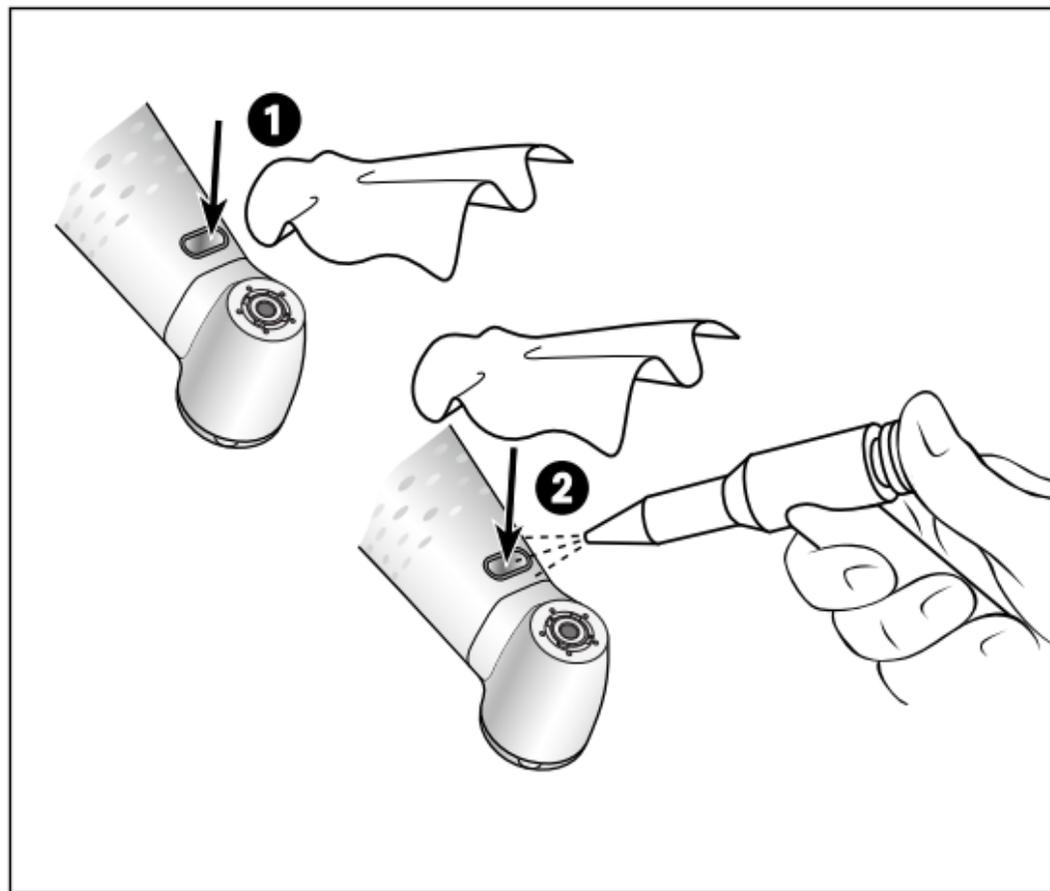

Lichtauge reinigen




Vermeiden Sie unbedingt ein Zerkratzen des Lichtauges!

- 1** Waschen Sie das Lichtauge mit Reinigungsflüssigkeit und einem weichen Tuch.
- 2** Trocknen Sie das Lichtauge mit der Luftpistole oder vorsichtig mit einem weichen Tuch.



Führen Sie nach jeder Reinigung eine Sichtprüfung durch. Nehmen Sie das Hand-/ Winkelstück bei beschädigtem Lichtauge nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen autorisierten W&H Servicepartner (siehe Seite 39).

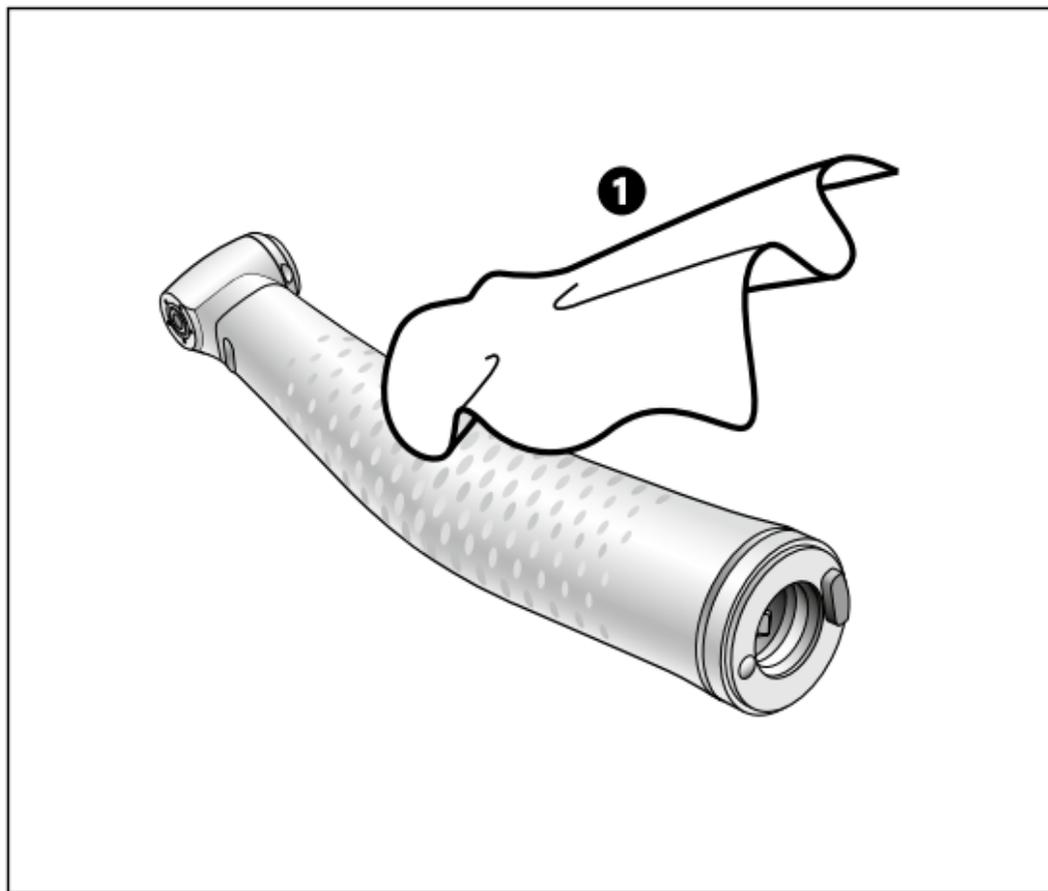

Manuelle Desinfektion

- > Desinfektion mit Desinfektionsmitteln;
❶ Wischdesinfektion wird empfohlen.
- > Verwenden Sie nur von offiziell anerkannten Instituten zertifizierte Desinfektionsmittel, die kein Chlor enthalten.
- > Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Anwendung des Desinfektionsmittels.



Nach der manuellen Reinigung, Desinfektion und Ölpflege ist eine abschließende thermische Desinfektion (unverpackt) oder Sterilisation (verpackt) im Dampfsterilisator Klasse B oder S (gemäß EN 13060) erforderlich.

Maschinelle Reinigung und Desinfektion innen und außen



Das Hand-/ Winkelstück kann im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.




W&H empfiehlt die Aufbereitung im Thermodesinfektor.

> Beachten Sie die Angaben der Hersteller für Geräte, Reinigungs- und Spülmittel.



> Achten Sie darauf, dass das Hand-/ Winkelstück nach der Thermodesinfektion innen und außen komplett trocken ist. Entfernen Sie eventuelle Flüssigkeitsreste mit Druckluft.

> Ölen Sie das trockene Hand-/ Winkelstück sofort nach der Thermodesinfektion.

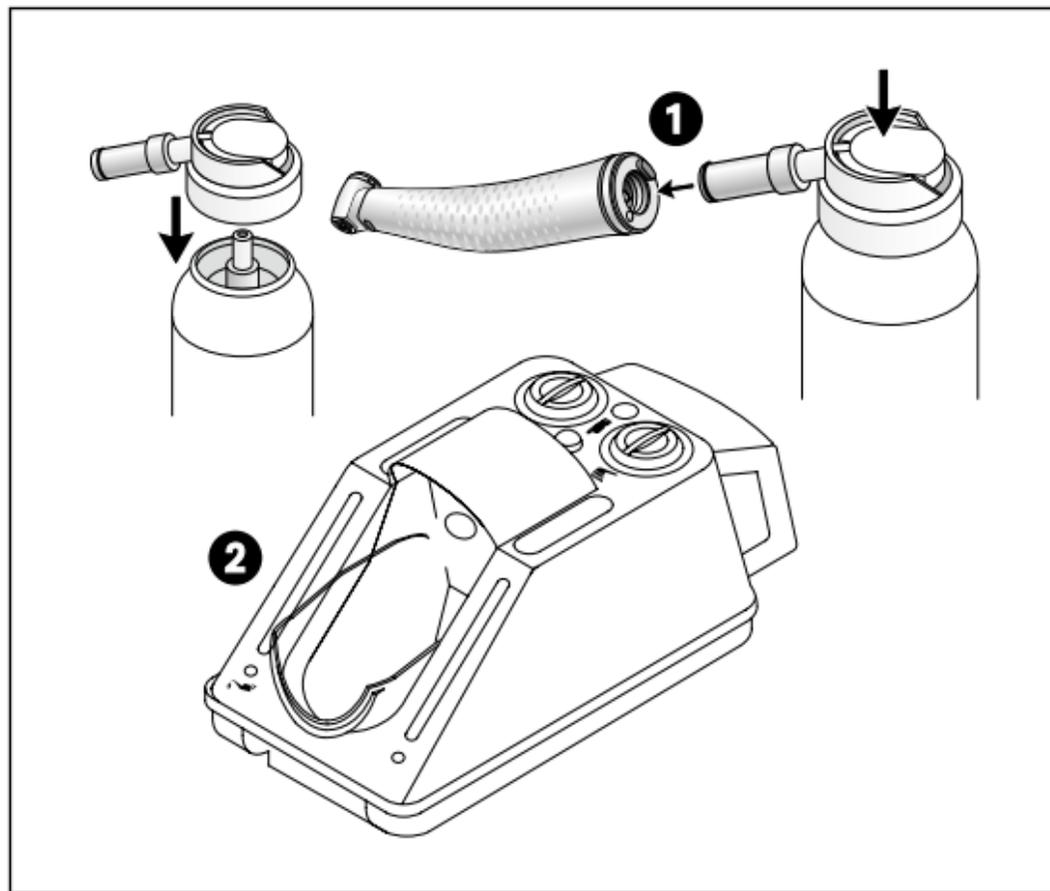


Tägliche Ölpflege

- ❶ Nur mit W&H Service Oil F1, MD-400
 - > Befolgen Sie die Anweisungen in der Gebrauchsanweisung der Ölspraydose.oder
- ❷ Nur mit W&H Assistina
 - > Siehe Assistina-Gebrauchsanweisung.

Empfohlene Pflegezyklen


- > Unbedingt nach jeder Innenreinigung
 - > Vor jeder Sterilisation
- oder
- > Nach 30 Minuten Einsatz bzw. mindestens 1x täglich

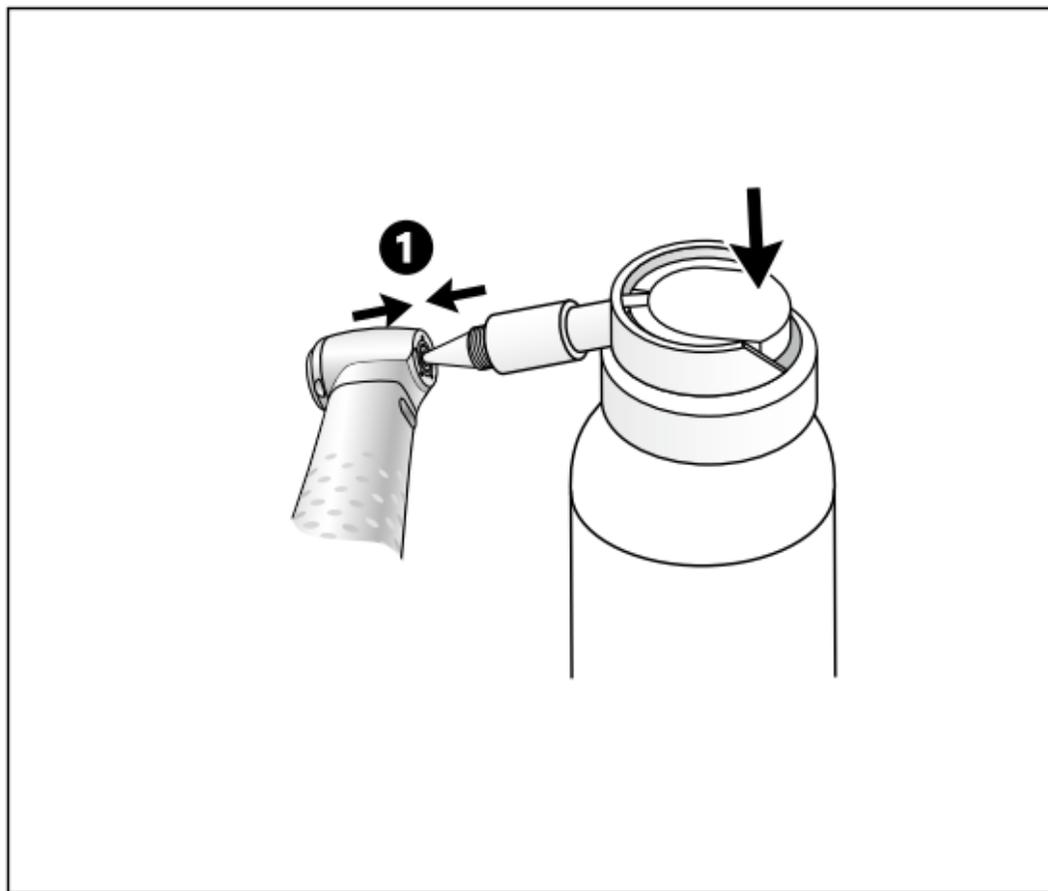

Wöchentliche Ölpflege des Spannsystems


- ❶ **Nur mit W&H Service Oil F1, MD-400**
 - > Setzen Sie den Sprühkopf REF 02036100 auf die Spraydose.
 - > Halten Sie das Winkelstück gut fest.
 - > Drücken Sie die Spitze des Sprühkopfes fest in das Spannsystem.
 - > Sprühen Sie ca. 1 Sekunde.

oder

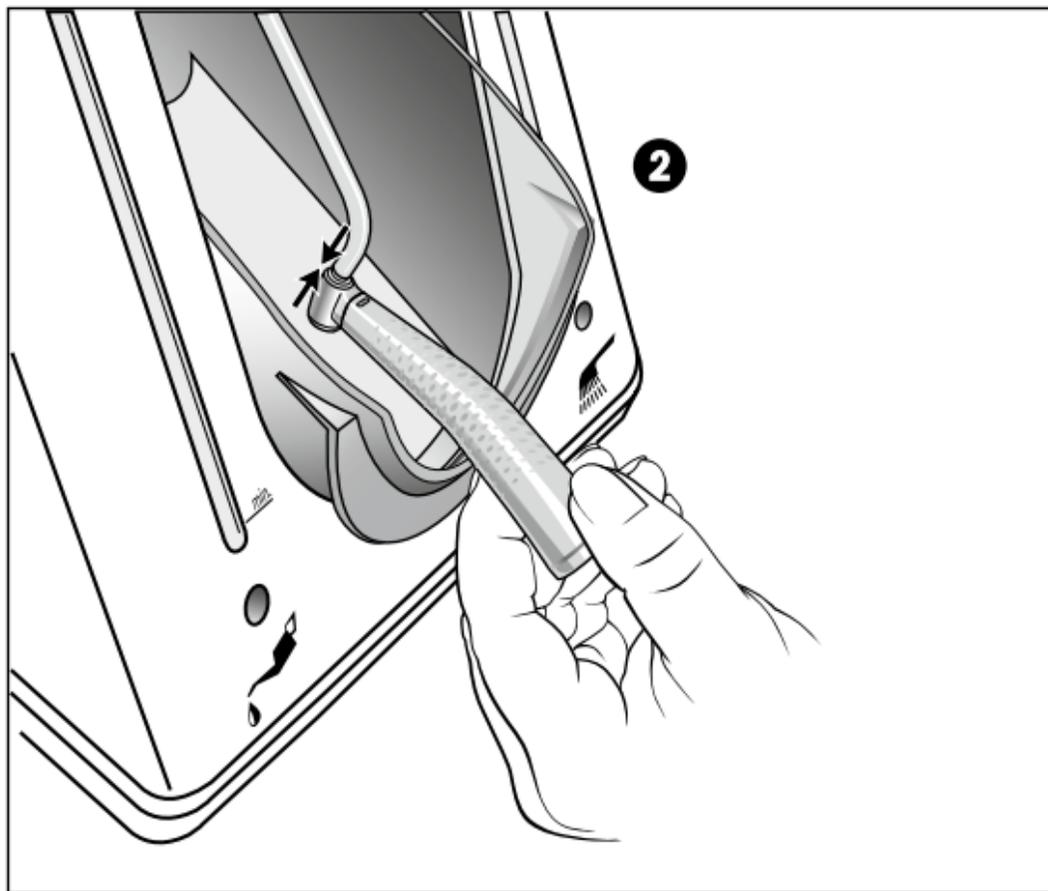

2 Nur mit W&H Assistina

- > Stecken Sie den Adapter REF 02693000 auf den Pflegeansatz. Die Austrittsöffnung zeigt nach unten.
- > Drücken Sie das Winkelstück bohrerseitig von unten an den Adapter.
- > Starten Sie die Assistina.
- > Drücken Sie das Winkelstück ca. 10 Sekunden an den Adapter.
- > Nehmen Sie das Winkelstück vom Adapter ab.
- > Schließen Sie die Kuppel der Assistina und lassen Sie die Restlaufzeit des Pflegezyklus (ca. 25 Sekunden) ablaufen.

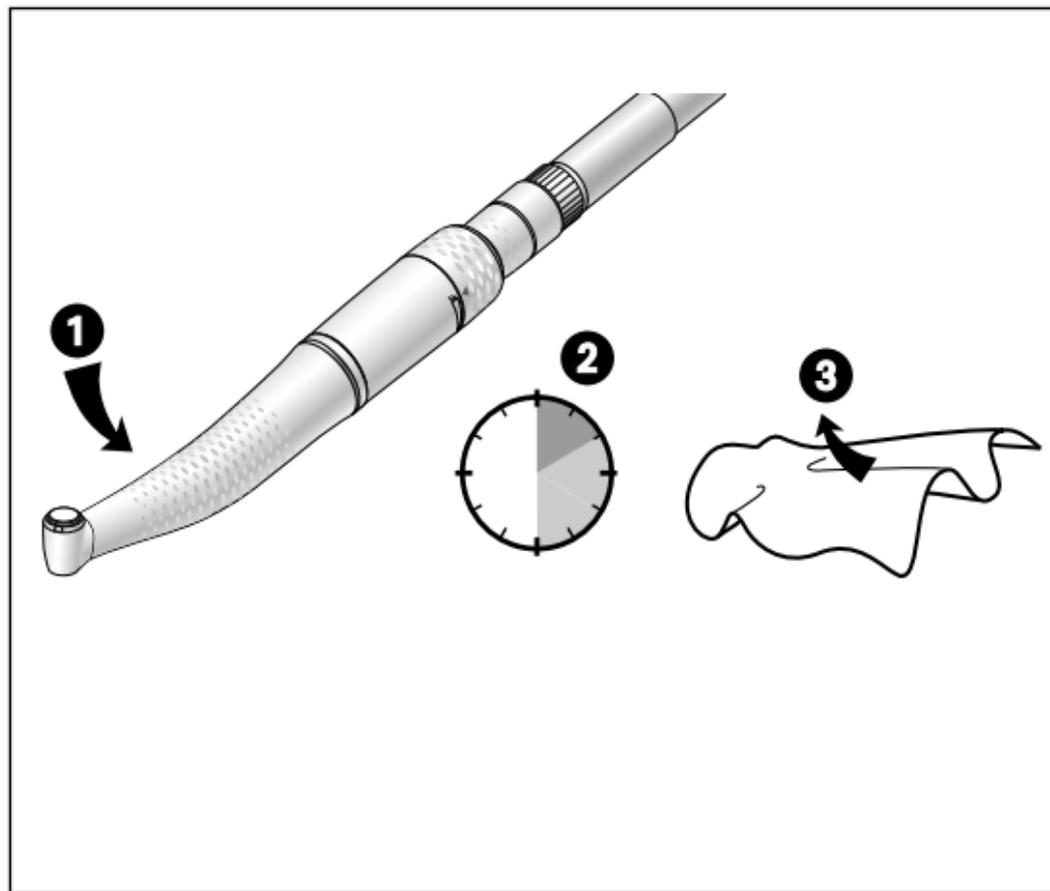

Probelauf nach der Ölpflege

- 1** Richten Sie das Handstück mit der Instrumentenspitze, das Winkelstück mit dem Kopf nach unten.
- 2** Lassen Sie das Hand-/ Winkelstück 30 Sekunden laufen, um überschüssiges Öl zu entfernen.
> Wiederholen Sie bei Schmutzaustritt den gesamten Hygiene- und Pflegeprozess.
- 3** Wischen Sie mit Zellstoff oder weichem Tuch das Hand-/ Winkelstück ab.

Sterilisation und Lagerung



W&H empfiehlt Sterilisation nach EN 13060, Klasse B

- > **Beachten Sie die Angaben des Geräte-Herstellers.**
- > **Reinigen, desinfizieren und ölen Sie vor dem Sterilisieren.**
- > **Schweißen Sie das Hand-/ Winkelstück und das Zubehör in Sterilgutverpackungen nach EN 868-5 ein.**
- > **Achten Sie darauf, dass Sie nur trockenes Sterilgut entnehmen.**
- > **Lagern Sie das Sterilgut staubfrei und trocken.**



Die Norm ISO 7785-2 / ISO 14457 schreibt eine Haltbarkeit von mindestens 250 Sterilisationszyklen vor. Bei dem Hand-/ Winkelstück von W&H empfehlen wir nach 1000 Sterilisationen oder einem Jahr einen regulären Service durchzuführen.

Freigegebene Sterilisationsverfahren



Beachten Sie Ihre länderspezifischen Richtlinien, Normen und Vorgaben.

- > Wasserdampf-Sterilisation Klasse B mit Sterilisatoren gemäß EN 13060.
Sterilisationshaltezeit mindestens 3 Minuten bei 134 °C

oder

- > Wasserdampf-Sterilisation Klasse S mit Sterilisatoren gemäß EN 13060.
Muss vom Hersteller des Sterilisators für die Sterilisation von Hand-/ Winkelstücken ausdrücklich freigegeben sein.
Sterilisationshaltezeit mindestens 3 Minuten bei 134 °C

6. W&H Accessories

Verwenden Sie nur Original W&H Zubehör und Ersatzteile!

Bezugsquelle: W&H Partner

301	W&H Assistina
02693000	Assistina-Adapter für Spannsystem
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 pcs)
02038200	Sprühkopf mit Sprayadapter für Hand-/ Winkelstücke
02036100	Sprühkopf mit Sprayadapter für Spannsystem
02015101	Düsenreiniger
01312500	Bohreranschlag
01312600	Gewindestift (für Demontage Bohreranschlag)

7. Technische Daten

Synea Vision	HK-43 LT
Übersetzungsverhältnis	1 : 1
Farbmarkierung	1 blauer Ring
Kupplung motorseitig laut Norm	ISO 3964
Instrumenten Ø lt. Norm EN ISO 1797-1:1995 (mm)	2,35
von W&H freigegebene Länge * (mm)	Winkelstückbohrer 34
Einspannung *	Winkelstückschaft: mit Bohreranschlag
min. Einspannlänge *	12
max. Motordrehzahl (min⁻¹)	40.000
Spraymenge nach ISO 7785-2 (ml/min)	> 50
Einstellbereich Wasser (empf. Wasserdruck) ** (bar)	0,5 – 2 (1,5)
Einstellbereich Chipluft (empf. Chipluftdruck) ** (bar)	1,5 – 3 (2)
Chipluftmenge bei 2 bar [NI/min]	> 1,5

* siehe Seite 33

Technische Daten

Synea Vision	WK-99 LT	WK-93 LT	WK-56 LT	WK-66 LT	WK-86 LT
Übersetzungsverhältnis	1:5	1:4,5	1:1	2:1	10:1
Farbmarkierung	1 oranger Ring	1 oranger Ring	1 blauer Ring	1 grüner Ring	1 grüner Ring
Kupplung motorseitig lt. Norm	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964
rotierende Instrumente EN ISO 1797-1:1995 (Ø mm)	1,6	1,6	2,35	2,35	2,35
von W&H freigegebene Länge * (mm)	25	21	34	34	34
max. Arbeitsteildurchmesser (mm)	2,5	2	–	–	–
min. Einspannlänge	auf Anschlag	auf Anschlag	einrastend	einrastend	einrastend
max. Motordrehzahl (min ⁻¹)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Spraymenge nach ISO 7785-2 (ml/min)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Einstellbereich Wasser (empf. Wasserdruck) ** (bar)	0,5 – 2 (1,5)	0,5 – 2 (1,5)	0,5 – 2 (1,5)	0,5 – 2 (1,5)	0,5 – 2 (1,5)
Einstellbereich Chipluft (empf. Chipluftdruck) ** (bar)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)	1,5 – 3 (2)
Chipluftmenge bei 2 bar (NI/min)	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5

* siehe Seite 33



* Handstück:

Wird das rotierende Instrument nicht auf Anschlag eingespannt, ist die Mindest-Einspannlänge einzuhalten. In diesem Fall bzw. bei Verwendung längerer rotierender Instrumente als 50 mm hat der Anwender durch richtige Wahl der Betriebsbedingungen dafür zu sorgen, dass keine Gefährdung des Anwenders, Patienten oder Dritten erfolgt.

* Winkelstücke:

Bei Verwendung längerer rotierender Instrumente hat der Anwender durch richtige Wahl der Betriebsbedingungen dafür zu sorgen, dass keine Gefährdung des Anwenders, Patienten oder Dritten erfolgt.

** Chipluftdruck / Wasserdruck müssen gleichzeitig eingestellt werden
Chipluftdruck muss höher sein als Wasserdruck

$\text{rpm} = \text{min}^{-1}$ (Umdrehungen pro Minute)

Temperaturangabe

Temperatur des Hand-/ Winkelstückes an der Bedienerseite:	max. 55 °C
Temperatur des Hand-/ Winkelstückes an der Patientenseite:	max. 50 °C
Temperatur des Arbeitsteils (rotierenden Instruments):	max. 41 °C

Physische Eigenschaften

Temperatur bei Lagerung und Transport:	-40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport:	8 % bis 80 % (relativ), nicht kondensierend
Temperatur bei Betrieb:	+10 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	15 % bis 80 % (relativ), nicht kondensierend

8. Recycling und Entsorgung

Recycling

W&H fühlt sich der Umwelt in besonderem Maße verpflichtet. Das Hand-/ Winkelstück sowie die Verpackung wurden so umweltverträglich wie möglich konzipiert.



Entsorgung des Hand-/ Winkelstückes

Beachten Sie Ihre länderspezifischen Gesetze, Richtlinien, Normen und Vorgaben für die Entsorgung von Elektro-Altgeräten. Stellen Sie sicher, dass die Teile bei der Entsorgung nicht kontaminiert sind.

Entsorgung der Verkaufsverpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Geben Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien in das Sammel- und Verwertungssystem. Sie tragen dazu bei, dass Rohstoffe wieder gewonnen und Abfälle vermieden werden.

Garantieerklärung

Dieses W&H Produkt wurde von hochqualifizierten Fachleuten mit größter Sorgfalt hergestellt. Vielfältige Prüfungen und Kontrollen garantieren eine einwandfreie Funktion. Beachten Sie bitte, dass Garantieansprüche nur bei Befolgung aller Anweisungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung gültig sind.

W&H haftet als Hersteller ab Kaufdatum für Material- oder Herstellungsfehler innerhalb einer Garantiezeit von 36 Monaten.

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder bei Reparatur durch nicht dazu von W&H ermächtigten Dritten, haften wir nicht!

Garantieansprüche sind – unter Beifügung des Kaufbelegs – an den Lieferanten oder an einen autorisierten W&H Servicepartner zu stellen. Die Erbringung einer Garantieleistung verlängert weder den Garantie- noch einen etwaigen Gewährleistungszeitraum.

36 Monate Garantie

Autorisierte W&H Servicepartner

Besuchen Sie W&H im Internet auf <http://wh.com>

Unter dem Menüpunkt »Service« finden Sie Ihren nächstgelegenen autorisierten W&H Servicepartner.

Wenn Sie keinen Internetzugang haben, kontaktieren Sie bitte

W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 60, A-5111 Bürmoos

t + 43 6274 6236-239, f + 43 6274 6236-890, E-Mail: service.at@wh.com

W&H CH-AG, Industriepark 9, CH-8610 Uster ZH

t + 41 43 4978484, f + 41 43 4978488, E-Mail: service.ch@wh.com

W&H Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 4, D-83410 Laufen

t + 49 8682 8967-0, f + 49 8682 8967-11, E-Mail: office.de@wh.com

Hersteller

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0,

office@wh.com

f + 43 6274 6236-55

wh.com

Form-Nr. 50746 ADT

Rev. 000 / 25.01.2013

Änderungen vorbehalten