

KaVo Pan eXam Plus

Kurzanleitung Pan eXam Plus

Bilderfassung und Patientenpositionierung

Panorama- bildgebung



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Pan eXam Plus – Übersicht über die Panorama-Bildgebung

Vorbereitende Arbeiten

i Schalten Sie das Gerät ein. Starten Sie die CliniView™ Software.

ii Erstellen oder öffnen Sie den Patienten in CliniView™ und aktivieren Sie die Bilderfassung durch Drücken der gelben Starttaste.




Wählen Sie das Bildgebungsprogramm.

PAN

1



Drücken Sie die Taste zur Patientenpositionierung.

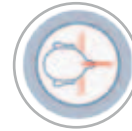


2

Wählen Sie die Belichtungswerte:

3


oder verwenden Sie vorprogrammierte Werte:

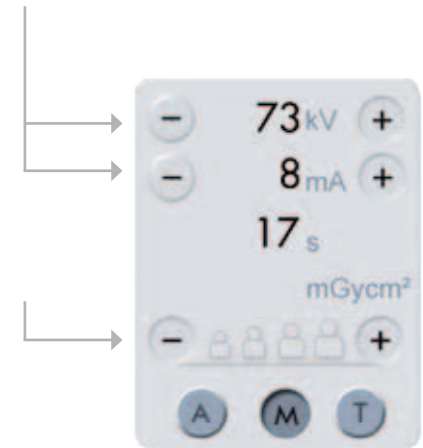

4 Positionieren Sie den Patienten entsprechend den Anleitungen im Bedienerhandbuch oder der Kurzanleitung zur Patientenpositionierung (nachfolgend).

5 Drücken Sie die Auslösetaste.

5

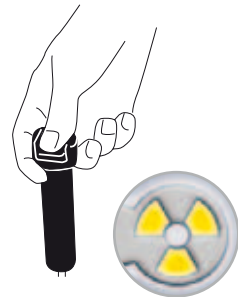


6 Schichtenauswahl (optional): Wählen Sie die Projektionen und drücken Sie die Taste zum Speichern.

6



7 Das Bild wird auf dem CliniView™ Bildschirm zur Anpassung und für die Diagnose angezeigt.

7

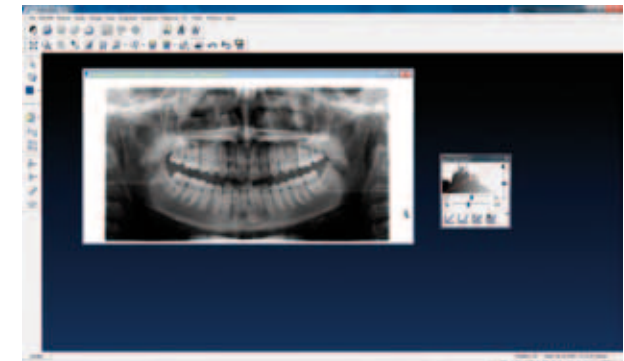

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Pan eXam Plus – Kurzanleitung für die Patientenpositionierung

PAN


P1
P2
P3
P4
P5
P9



Standard-
Aufbissblock


Richten Sie den Patienten auf die vertikale Lichtlinie (Medianebene) aus.

1

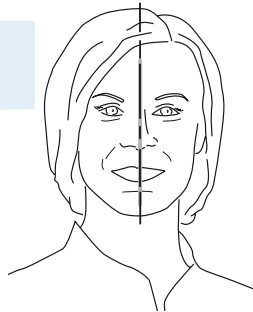


Richten Sie den Patienten mit Hilfe des Lichtstrahls zur Frankfurter Horizontalen aus.

2

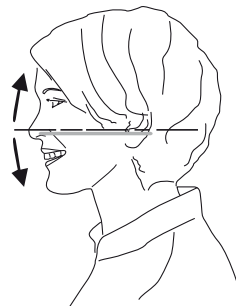

Überprüfen Sie die Eckzahn-Position und passen Sie die Schicht ggf. an.

3

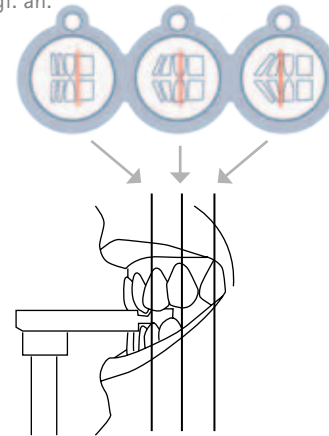


Bitte den Patienten, zu schlucken und die Zunge gegen den Gaumen zu drücken.

4

Drücken Sie die Auslösetaste.

5

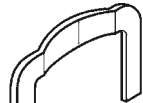

Für zahnlose
Patienten


TMJ




TMJ-
Nasenstütze

Bitte den Patienten, sich in das Gerät zu stellen.

1

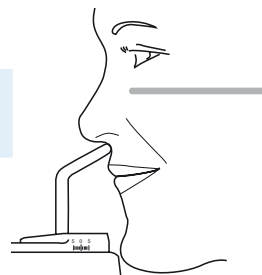


Mund geschlossen

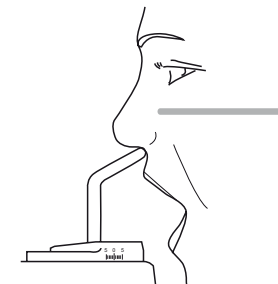

Mund geöffnet


Richten Sie den Patienten auf die vertikale Lichtlinie (Medianebene) aus.

2

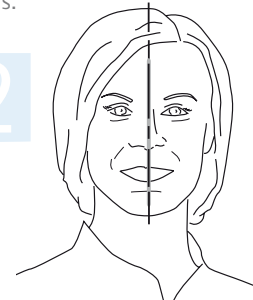

Richten Sie das TMJ-Licht auf dem Kiefergelenk aus.

3

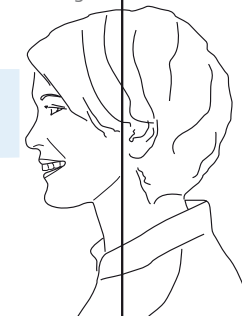

4



Drücken Sie die Auslösetaste.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Pan eXam Plus

Mat.-Nr.: 206890-1 12/10 de Technische Änderungen vorbehalten. Geringfügige Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.