



Nordent InstRenew®

Instrumentenschleifmaschine

Bester Schliff für beste Ergebnisse

Zum Aufschleifen von Scaler und Küretten aller Marken und Hersteller. Ideal für Ihre Praxis. Die InstRenew ist mobil, kostengünstig und sehr einfach in Handhabung.



Produktdetails:

- * Gewicht 2.1 kg
- * Breite 15 cm
- * Länge 20 cm
- * Höhe mit der Einspannvorrichtung 12 cm

Im Lieferumfang enthalten:

- * Gebrauchsanweisung auf deutsch
- * ein Teststäbchen zum Überprüfen der Schärfe
- * Netzteil zur Stromversorgung
- * Werkzeugschlüssel zum Auswechseln des Schleifkonus

Und so wird es gemacht !



Ausrichtung der Klinge

Setzen Sie die Rückenfläche der Klinge (Krümmung aufwärts) in die Rille im Klingenhalter, so dass die Spitze der Klinge vom Bediener weg weist. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche der Klinge sich unterhalb des Arretierbalkens befindet. Halten Sie den Handgriff des Instruments locker in Position. Drehen Sie nun den Feststellkopf im Uhrzeigersinn, um den Haltebalken abzusenken. Ziehen Sie den Knopf fest, bis das Instrument vollständig fixiert ist, und ohne weitere Unterstützung seine Stellung beibehält.



Fixieren des Schaftes

Die Schaft-Klemme wird mit drei Stellknöpfen eingestellt: Der hintere Knopf öffnet und schliesst die Klemme. Mit dem vorderen Knopf können die Klemmbanken um 360 Grad gedreht werden. Der untere Knopf ermöglicht das Absenken und Anheben der Schaft-Klemme auf die ideale Höhe für die Instrumente in Ihrem Set. Durch Drehung des vorderen Knopfes lassen sich die Klemmbanken so ausrichten, dass sie einen geraden Anteil des Instrumentenschaftes umfassen. Ziehen Sie den hinteren Kopf sehr fest an, um den Schaft zwischen den Klemmbanken vollständig unbeweglich festzustellen. Auch die Drehbarkeit der gesamten Schaft-Klemme wird dabei automatisch blockiert.



Schärfen der Klinge

Drehen Sie den Feststellknopf des Klingenhalters im Gegenuhrzeigersinn, so dass die Klinge freigegeben wird. Drücken Sie den roten Knopf, um InstRenew2 einzuschalten. Nehmen Sie nun die Schaftklemme und bewegen jede Schneidekante ein- bis zweimal sanft an dem sich bewegenden Schleifkonus entlang, jeweils gleichmäßig von der Spitze/Rundung der Arbeitsfläche ausgehend bis zum Ende. Drücken Sie den roten Knopf, um InstRenew2 auszuschalten. Bevor Sie das Instrument aus der Klemme herausnehmen, sollten Sie die Klinge einmal außen über das Gerät hinausstehen lassen und die erzielte Schärfe an dem mitgelieferten Teststäbchen prüfen.